

## With Enrichment Dx

PARA UTILIZAÇÃO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO  
APENAS PARA EXPORTAÇÃO

## Utilização prevista

O Illumina® DNA Prep with Enrichment Dx Kit é um conjunto de reagentes e consumíveis utilizado para preparar bibliotecas de amostras a partir de ADN genómico com origem em células e tecido humano. São necessários painéis de sonda fornecidos pelo utilizador para a preparação de bibliotecas que visem regiões genómicas de interesse específicas. As bibliotecas de amostras geradas destinam-se a ser utilizadas nos sistemas de sequenciação da Illumina.

## Princípios do procedimento

O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit destina-se à preparação de bibliotecas de sequenciação de ADN enriquecidas para regiões alvo a partir de ADN genómico proveniente de células e tecido humanos.

São necessários painéis de oligonucleótidos biotinilados fornecidos pelo utilizador para o enriquecimento de alvos. O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com uma variedade de tamanhos de painel, incluindo painéis pequenos (< 20 000 sondas) a painéis grandes (> 200 000 sondas). As bibliotecas de amostras geradas destinam-se a ser sequenciadas nos sistemas de sequenciação da Illumina.

O procedimento do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit contém os seguintes componentes:

- **Tagment Genomic DNA** (Fragmentar e marcar ADN genómico) — Usa o reagente Enrichment BLT Small (eBLTS) para fragmentar e marcar a entrada de ADN. Durante a fragmentação e a marcação, o ADN genómico é fragmentado e marcado com adaptadores num só passo. É necessária uma entrada mínima de ADN de 50 ng para saturar o eBLTS na reação de fragmentação e marcação. Quando saturado, o eBLTS fragmenta um número determinado de moléculas de ADN para gerar bibliotecas normalizadas com uma distribuição de tamanho de fragmentos consistente.
- **Post Tagmentation Cleanup** (Limpeza posterior à fragmentação e marcação) — Limpa o ADN marcado por adaptador no eBLTS para utilização na amplificação.
- **Amplify Tagmented DNA** (Amplificar ADN fragmentado e marcado) — Amplifica o ADN fragmentado e marcado usando um programa para PCR de ciclo limitado. São adicionados índices duais únicos (Unique Dual, UD) à extremidade dos fragmentos de ADN, o que permite a introdução dual de códigos de barra únicos nas bibliotecas de ADN e a geração de clusters durante a sequenciação.
- **Clean Up Libraries** (Limpar bibliotecas) — Usa um procedimento de purificação por esferas para purificar e selecionar tamanhos do ADN amplificado.
- **Pool Libraries** (Criar pool de bibliotecas) — Combina bibliotecas de ADN com índices únicos num pool de até 12 bibliotecas. Pode criar um pool de bibliotecas por volume ou massa.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- **Hybridize Probes** (Hibridizar sondas) — Consiste numa reação de hibridização durante a qual as bibliotecas de ADN de cadeia dupla são desnaturadas e o painel de sondas de ADN biotiniladas é hibridizado com as regiões genómicas alvo.
  - O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com múltiplos painéis. O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não inclui um painel de enriquecimento. Os painéis de sondas são fornecidos pelo utilizador e devem cumprir as especificações necessárias. Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit são compatíveis com painéis de enriquecimento de oligonucleótidos de ADN da Illumina e de terceiros que cumpram as especificações necessárias. Para mais informações sobre especificações necessárias para painéis de terceiros, consulte [Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento na página 11](#)
- **Capture Hybridized Probes** (Capturar sondas hibridizadas) — Utiliza esferas magnéticas de estreptavidina (Streptavidin Magnetic Beads, SMB3) para capturar sondas biotiniladas hibridizadas com as regiões alvo de interesse.
- **Amplify Enriched Libraries** (Amplificar bibliotecas enriquecidas) — Usa PCR para amplificar bibliotecas enriquecidas.
- **Clean Up Amplified Enriched Libraries** (Limpeza de bibliotecas enriquecidas amplificadas) — Utiliza um procedimento de purificação por esferas para purificar as bibliotecas enriquecidas prontas para sequenciação.
- **Sequencing** (Sequenciação) — A sequenciação de bibliotecas enriquecidas é realizada em sistemas de sequenciação MiSeqDx, NextSeq 550Dx ou NovaSeq 6000Dx. No MiSeqDx e no NextSeq 550Dx, o DNA GenerateFASTQ Dx Local Run Manager Module integrado é usado para a configuração do ensaio de sequenciação, a monitorização do ensaio e a análise primária (geração de ficheiros FASTQ a partir das identificações de bases). No NovaSeq 6000Dx, o DRAGEN for Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Application é utilizado para a configuração do ensaio e a análise secundária com vários fluxos de trabalho disponíveis.

## Limitações do procedimento

- Para utilização em diagnóstico *in vitro*.
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com ADN genómico proveniente de células e tecido humanos.
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com entradas de ADN genómico de cadeia dupla de 50 a 1000 ng. O desempenho não é garantido com entradas que excedam estes limites.
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não inclui os reagentes para extração de ADN. Os resultados de testes analíticos, incluindo testes de interferência, fornecidos em [Características de desempenho na página 59](#) foram obtidos com sangue inteiro e amostras FFPE, como tipos de amostras representativos com kits de extração de ADN representativos. Todos os testes de diagnósticos desenvolvidos para utilização com reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit requerem validação completa para todos os aspetos de desempenho com o kit de extração de DNA escolhido.

## With Enrichment Dx

- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não é recomendado para amostras FFPE de fraca qualidade com  $\Delta Cq > 5$ . Utilizar amostras com  $\Delta Cq > 5$  pode aumentar a probabilidade de falha de preparação da biblioteca e diminuir o desempenho do ensaio.
- Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit foram configurados e testados para a entrada de amostras, reações de enriquecimento e plexagem indicados na seguinte tabela.

<b>Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit</b>	<b>Entrada de amostras</b>	<b>Reações de enriquecimento</b>	<b>Plexagem de enriquecimento</b>
Kit de 16 amostras	Baixa qualidade (FFPE)	16 reações	1-plex
Kit de 96 amostras	Elevada qualidade (por ex., sangue inteiro)	8 reações	12-plex

- O processamento da entrada de amostras FFPE foi testado e é recomendado exclusivamente para reações de enriquecimento 1-plex, utilizando o kit de 16 amostras.
- Para o kit de 96 amostras, é possível utilizar plexagens não standard (2-plex a 11-plex), mas com as seguintes limitações:
  - O processamento de amostras em reações de enriquecimento 2-plex a 11-plex reduz significativamente o rendimento do kit.
  - Não estão garantidos resultados otimizados. Para obter rendimentos de enriquecimento adequados em plexagens não standard, pode ser necessária uma otimização adicional.
  - Para estratégias de pooling de baixa plexagem (2-plex a 8-plex), é necessário selecionar adaptadores de índice com sequências diversificadas de forma a otimizar o equilíbrio de cores para uma sequenciação e uma análise de dados bem-sucedidas. O módulo do DNA GenerateFASTQ Dx no MiSeqDx e no NextSeq 550Dx fornece opções para combinações de índices equilibrados por cor durante a configuração do ensaio. Para mais informações sobre estratégias de pooling, consulte [Métodos de pooling na página 35](#).
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit está limitado a disponibilizar bibliotecas enriquecidas que são sequenciadas apenas no MiSeqDx, no NextSeq 550Dx e no NovaSeq 6000Dx. A utilização de outros sistemas de sequenciação requer a validação completa para todos os aspetos de desempenho.
- Os painéis de enriquecimento não estão incluídos como parte deste produto. Os resultados de teste analíticos fornecidos em [Características de desempenho na página 59](#) foram obtidos com painéis de enriquecimento representativos e são fornecidos apenas para fins informativos. As características de desempenho analíticas servem para exemplificar as capacidades gerais do ensaio e não estabelecem as capacidades ou compatibilidades relativas a quaisquer alegações específicas do ensaio. Todos os testes de diagnóstico desenvolvidos para utilização com estes reagentes requerem validação completa para todos os aspetos de desempenho.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com os painéis de enriquecimento da Illumina e de terceiros. Contudo, o desempenho não está garantido com painéis de enriquecimento de terceiros que não cumpram os requisitos de painel. Para informações sobre os requisitos dos painéis, consulte [Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento na página 11](#).
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit usa um tempo de hibridização de 2 horas. Usar um tempo de hibridização superior pode afetar as métricas de desempenho.
- Os módulos do DNA GenerateFASTQ Dx Local Run Manager para o MiSeqDx e o NextSeq 550Dx só originam ficheiros FASTQ. Se está a utilizar estes módulos, tem de fazer uma validação da análise secundária.
- O DRAGEN for Illumina DNA Prep With Enrichment Dx Application está disponível no NovaSeq 6000Dx. A aplicação inclui vários fluxos de trabalho de análise secundária, incluindo geração de ficheiros FASTQ, geração de ficheiros FASTQ e VCF para deteção de variantes de linha germinal e geração de ficheiros FASTQ e VCF para deteção de variantes somáticas. Se está a utilizar a aplicação para gerar ficheiros VCF, não precisa de realizar a validação da análise secundária.
- Para consultar as limitações do DRAGEN for Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Application quando utilizado com NovaSeq 6000Dx, consulte o *NovaSeq 6000Dx Instrument Package Insert (Folheto informativo do NovaSeq 6000Dx Instrument)* (documento n.º 200025276).

## Componentes do produto

O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit contém os seguintes componentes.

- Illumina DNA Prep with Enrichment Dx with UD Indexes Set A, catálogo n.º 20051354 (16 amostras) ou n.º 20051352 (96 amostras)
- Illumina DNA Prep with Enrichment Dx with UD Indexes Set B, catálogo n.º 20051355 (16 amostras) ou n.º 20051353 (96 amostras)
- Local Run Manager DNA GenerateFASTQ Dx Module for NextSeq 550Dx, catálogo n.º 20063024
- Local Run Manager DNA GenerateFASTQ Dx Module for MiSeqDx, catálogo n.º 20063022
- DRAGEN for Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Application for NovaSeq 6000Dx, catálogo n.º 20074609

## Reagentes fornecidos

Para concluir o Illumina DNA Prep with Enrichment Dx, é necessário um Illumina DNA Prep with Enrichment Dx with UD Indexes Set A ou um Illumina DNA Prep with Enrichment Dx with UD Indexes Set B. Pode realizar os seguintes números de reações de preparação e enriquecimento de bibliotecas usando um kit de 16 ou de 96 amostras.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit	Entrada de amostras	Reações de enriquecimento	Plexagem de enriquecimento
Kit de 16 amostras	Baixa qualidade (FFPE)	16 reações	1-plex
Kit de 96 amostras	Elevada qualidade (por ex., sangue inteiro)	8 reações	12-plex

## Illumina DNA Prep with Enrichment Dx with UD Indexes Set A/B

### Illumina Prep Dx Tagmentation Reagents 1, armazene entre 15 °C e 30 °C

Os seguintes reagentes são fornecidos à temperatura ambiente. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado.

Nome do reagente	Quantidade do tubo		Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
	16 amostras (n.º 20050020)	96 amostras (n.º 20050025)			
Stop Tagment Buffer (Tampão de fragmentação e marcação de paragem) 2 (ST2)	1	4	Vermelho	350 µl	Solução de detergente em água.
Tagment Wash Buffer (Tampão de lavagem de fragmentação e marcação) 2 (TWB2)	1	1	Verde	41 ml	Solução aquosa tamponada que contém detergente e sal.
Cleanup Beads (Esferas de limpeza) (CB)	1	N/A*	Vermelho	10 ml	Esferas paramagnéticas de fase sólida em solução aquosa tamponada.

\* O Illumina Prep Dx Cleanup Beads 96 Samples (n.º 20050030) inclui esferas de limpeza para 96 amostras.

## With Enrichment Dx

**Illumina Prep Dx Cleanup Beads (96 Samples), armazene entre 15 °C e 30 °C**

Para kits de 96 amostras, o Illumina Prep Dx Cleanup Beads (catálogo n.º 20050030) inclui as esferas de limpeza. O seguinte reagente é fornecido à temperatura ambiente. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado. Para conjuntos de 16 amostras, o Illumina Prep Dx Tagmentation Reagents 1 (catálogo n.º 20050020) inclui as esferas de limpeza.

Nome do reagente	Quantidade	Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
Cleanup Beads (Esferas de limpeza) (CB)	4	Vermelho	10 ml	Esferas paramagnéticas de fase sólida em solução aquosa tamponada.

**Illumina DNA Prep Dx Tagmentation Reagents 2, armazene entre 2 °C e 8 °C**

Os seguintes reagentes são fornecidos refrigerados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado. Armazene o tubo de armazenamento de eBLTS na vertical de maneira que as esferas estejam sempre submersas na solução tampão.

Nome do reagente	Quantidade do tubo		Cor da tampa	Volume de enchimento		Substâncias ativas
	16 amostras (n.º 20050021)	96 amostras (n.º 20050026)		16 amostras	96 amostras	
Enrichment BLT Small (BLT de enriquecimento pequeno) (eBLTS)	1	4	Amarelo	200 µl	290 µl	Esferas magnéticas de estreptavidina ligadas a transposomas numa solução aquosa tamponada que contém glicerol, EDTA, ditiotreitól, sal e detergente.
Resuspension Buffer (Tampão de ressuspensão) (RSB)	1	4	Límpido	1,8 ml	1,8 ml	Solução aquosa tamponada.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Illumina Prep Dx Tagmentation Reagents 3, armazene entre -25 °C e -15 °C

Os seguintes reagentes são fornecidos congelados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado.

Nome do reagente	Quantidade do tubo		Cor da tampa	Volume de enchimento		Substâncias ativas
	16 amostras (n.º 20050022)	96 amostras (n.º 20050027)		16 amostras	96 amostras	
Tagmentation Buffer (Tampão de fragmentação e marcação) 1 (TB1)	1	4	Límpido	290 µl	290 µl	Solução aquosa tamponada que contém sal de magnésio e dimetilformamida.
Enhanced PCR Mix (Mistura PCR melhorada) (EPM)	2	4	Límpido	200 µl	610 µl	Polimerase de ADN e desoxirribonucleótidos trifosfatados em solução aquosa tamponada.

## Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (16 samples), armazene entre 2 °C e 8 °C

Para kits de 16 amostras, o Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (catálogo n.º 20050023) inclui os seguintes reagentes. Para kits de 96 amostras, o Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (catálogo n.º 20050028) vem com os reagentes incluídos.

Os seguintes reagentes são fornecidos refrigerados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado.

Nome do reagente	Quantidade do tubo	Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
Streptavidin Magnetic Beads (Esferas magnéticas de estreptavidina) (SMB3)	4	Límpido	1,2 ml	Esferas magnéticas de estreptavidina em solução aquosa tamponada que contém formamida, detergente e sal.
Resuspension Buffer (Tampão de ressuspensão) (RSB)	1	Límpido	1,8 ml	Solução aquosa tamponada.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome do reagente	Quantidade do tubo	Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
Enrichment Hyb Buffer (Tampão de hibridização de enriquecimento) 2 (EHB2)	1	Límpido	200 µl	Solução aquosa tamponada que contém detergente e sal.
Elute Target Buffer (Tampão alvo de eluição) 2 (ET2)	1	Límpido	200 µl	Solução aquosa tamponada.

## **Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (96 samples), armazenar entre 2 °C e 8 °C**

Para kits de 96 amostras, o Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (catálogo n.º 20050028) inclui os seguintes reagentes. Para kits de 16 amostras, o Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 1 (catálogo n.º 20050023) vem com os reagentes incluídos.

Os seguintes reagentes são fornecidos refrigerados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado.

Nome do reagente	Quantidade do tubo	Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
Streptavidin Magnetic Beads (Esferas magnéticas de estreptavidina) (SMB3)	2	Límpido	1,2 ml	Esferas magnéticas de estreptavidina em solução aquosa tamponada que contém formamida, detergente e sal.
Resuspension Buffer (Tampão de ressuspensão) (RSB)	4	Límpido	1,8 ml	Solução aquosa tamponada.
Enrichment Hyb Buffer (Tampão de hibridização de enriquecimento) 2 (EHB2)	1	Límpido	200 µl	Solução aquosa tamponada que contém detergente e sal.
Elute Target Buffer (Tampão alvo de eluição) 2 (ET2)	1	Límpido	200 µl	Solução aquosa tamponada.



# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Illumina DNA Prep Dx Enrichment Reagents 2, armazene entre -25 °C e -15 °C

Os seguintes reagentes são fornecidos congelados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado.

Nome do reagente	Quantidade do tubo		Cor da tampa	Volume de enchimento	Substâncias ativas
	16 amostras (n.º 20050024)	96 amostras (n.º 20050029)			
Enrichment Elution Buffer (Tampão de eluição de enriquecimento) 1 (EE1)	1	1	Límpido	580 µl	Solução de detergente em água.
Enhanced Enrichment Wash Buffer (Tampão de lavagem de enriquecimento melhorado) (EEW)	4	4	Âmbar	4,1 ml	Solução aquosa tamponada que contém sais e detergente.
PCR Primer Cocktail (Cocktail de primers PCR) (PPC)	1	1	Límpido	320 µl	Mistura de primers de PCR (oligonucleótidos).
2 N NaOH (HP3)	1	1	Límpido	200 µl	Solução 2 N de hidróxido de sódio (NaOH).
HYB Buffer 2 + IDT NXT Blockers (Tampão de hibridização 2 + Bloqueadores IDT NXT)	2	1	Azul	480 µl	Solução aquosa tamponada com ADN Cot-1, agente aglomerante e formamida.
Enhanced PCR Mix (Mistura PCR melhorada) (EPM)	2	1	Límpido	200 µl	Polimerase de ADN e desoxirribonucleótidos trifosfatados em solução aquosa tamponada.

## Illumina Unique Dual Index Dx Set A/B, armazene entre -25 °C a -15 °C

Os seguintes reagentes são fornecidos congelados. Armazene os reagentes de imediato à temperatura indicada de forma a garantir um desempenho adequado. Para sequências do adaptador de índice, consulte [Anexo: Sequências de adaptador de índice dual único da Illumina na página 63](#).

Componente	Quantidade
Illumina Unique Dual Index Dx Set A (96 Indexes), n.º 20050038	1
Illumina Unique Dual Index Dx Set B (96 Indexes), n.º 20050039	1

## Reagentes não fornecidos

### Reagentes necessários, mas não fornecidos

- Reagentes de extração e purificação de ADN
- Reagentes de quantificação de ADN
- Etanol (prova 200 para biologia molecular)
- Água isenta de nuclease
- 1 M Tris-HCl, pH 7,0
- 10 mM Tris-HCl, pH 7,5 a 8,5
- Solução 1 N NaOH, grau para biologia molecular
- Se utilizar um sistema de sequenciação NextSeq 550Dx:
  - NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 (300 cycles) (catálogo n.º 20028871)
- Se utilizar um sistema de sequenciação MiSeqDx:
  - MiSeqDx Reagent Kit v3 (catálogo n.º 20037124)
- Se utilizar um sistema de sequenciação NovaSeq 6000Dx:
  - NovaSeq 6000Dx S2 Reagent Kit (300 cycles) (catálogo n.º 20046931)
  - NovaSeq 6000Dx S4 Reagent Kit (300 cycles) (catálogo n.º 20046933)
  - NovaSeq 6000Dx S2 Buffer Cartridge (catálogo n.º 20062292)
  - NovaSeq 6000Dx S4 Buffer Cartridge (catálogo n.º 20062293)
  - NovaSeq 6000Dx Library Tube (catálogo n.º 20062290)
  - NovaSeq 6000Dx Library Tube, 24 Pack (catálogo n.º 20062291)

## Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento

Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit são compatíveis com painéis de enriquecimento de oligonucleótidos de ADN da Illumina e de terceiros. Se utilizar sondas de ADN biotinizadas (painéis fixos ou personalizados) de terceiros, assegure-se de que estas cumprem as especificações exigidas.

O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit foi otimizado e validado usando as seguintes especificações de painel de terceiros. Um desempenho equiparável não é garantido usando painéis de terceiros que não cumpram as especificações.

- Comprimento de sonda 80 bp ou 120 bp
- Entre 500 e 675 000 sondas
- ADN de cadeia única ou de cadeia dupla
- Entrada de sonda total de  $\geq 3$  pmols para enriquecimento em plexagens de 1-plex a 12-plex

## Armazenamento e manuseamento

- A temperatura ambiente é definida entre 15 °C e 30 °C.
- Os reagentes mantêm-se estáveis até à data de validade especificada nas etiquetas dos kits quando armazenados conforme indicado. Para verificar as temperaturas de armazenamento, consulte [Reagentes fornecidos na página 4](#).
- Os reagentes congelados mantêm-se estáveis durante um máximo de quatro de ciclos de congelação-descongelação que ocorram antes da data de validade especificada.
- O procedimento do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit contém os seguintes pontos de paragem de segurança:
  - Após o passo [Amplificar ADN fragmentado e marcado na página 30](#), as bibliotecas amplificadas mantêm-se estáveis até um máximo de 30 dias se armazenadas entre -25 °C e -15 °C.
  - Após o passo [Limpar bibliotecas na página 32](#), as bibliotecas amplificadas limpas mantêm-se estáveis até um máximo de 30 dias se armazenadas entre -25 °C e -15 °C.
  - Após o passo [Criar pool de bibliotecas pré-enriquecidas na página 35](#), as bibliotecas em pool mantêm-se estáveis até um máximo de 30 dias se armazenadas entre -25 °C e -15 °C.
  - Após o passo [Amplificar biblioteca enriquecida na página 46](#), a placa de bibliotecas amplificadas e enriquecidas pode permanecer no termociclador até 24 horas. Em alternativa, a placa pode ser armazenada entre 2 °C e 8 °C durante 48 horas.
  - As bibliotecas enriquecidas limpas finais mantêm-se estáveis até a um máximo de 7 dias se armazenadas entre -25 °C e -15 °C.
- Se qualquer parte da embalagem ou do conteúdo dos componentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit estiver danificada ou comprometida, contacte o Apoio ao Cliente da Illumina.

- O Stop Tagment Buffer (Tampão de fragmentação e marcação de paragem) 2 (ST2) pode formar precipitados ou cristais visíveis. Se observar precipitados, aqueça a 37 °C durante 10 minutos e, em seguida, agite por vórtex até o precipitado dissolver.
- O Hybridization Oligos Buffer (Tampão de oligonucleótidos de hibridização) (HYB) e o Enhanced Enrichment Wash Buffer (Tampão de lavagem de enriquecimento melhorado) (EEW) têm de ser pré-aquecidos até à temperatura de manutenção da hibridização aplicável por tipo de amostra e painel de sondas. Para mais informações sobre a manipulação do NHB2 e do EEW, consulte [Notas processuais na página 17](#).
- O Enrichment Hyb Buffer 2 (Tampão de hibridização de enriquecimento) 2 (EHB2) e o HYB Buffer+IDT NXT Blockers (Tampão de hibridização + Bloqueadores IDT NXT) (NHB2) podem desenvolver cristais e turvação. Se forem observados cristais ou turvação, agite com o vórtex ou pipete para cima e para baixo para misturar até a solução ficar límpida. Assegure-se de pré-aquecer o NHB2 antes de pipetar.
- Ao manusear as esferas de limpeza, use as seguintes boas práticas:
  - Nunca congele as esferas.
  - Imediatamente antes de utilizar, agite as esferas por vórtex até estarem ressuspensas e a cor pareça homogénea.
- Ao manusear o Enrichment BLT Small (BLT de enriquecimento pequeno) (eBLTS), siga as seguintes boas práticas:
  - Armazene o tubo de eBLTS na vertical de forma que as esferas estejam sempre submersas na solução tampão.
  - Agite o eBLTS por vórtex completamente até que as esferas estejam ressuspensas. Para evitar a sedimentação das esferas, não se recomenda a centrifugação antes da pipetagem.
  - Se as esferas aderirem aos bordos ou ao topo da placa de 96 poços, centrifugue a 280 × g durante 3 segundos e, em seguida, pipete para ressuspender.
- Ao manusear as placas de adaptador de índice, use as seguintes boas práticas:
  - Não adicione amostras à placa de adaptador de índice.
  - Cada poço da placa de índice é para utilização única.

## Equipamento e materiais necessários, não fornecidos

Além do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit, verifique se tem os equipamentos e materiais necessários antes de iniciar o protocolo.

### Equipamento

Certifique-se de que tem o equipamento necessário antes de iniciar o protocolo.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

O protocolo foi otimizado e validado utilizando artigos com as especificações listadas. Um desempenho equiparável não é garantido utilizando equipamento diferente do especificado.

Alguns artigos são apenas necessários para fluxos de trabalho específicos. Estes artigos estão especificados em tabelas separadas.

- Termociclador com as seguintes especificações:
  - Tampa aquecida
  - Intervalo mínimo de controlo de temperatura de 10 °C a 98 °C
  - Precisão mínima de temperatura de  $\pm 0,25$  °C
  - Volume de reação máximo de 100  $\mu$ l
  - Compatível com placas de PCR de 96 poços com saia completa
- Incubador de microamostras com as seguintes especificações:
  - Intervalo de temperatura do ambiente de +5,0 °C a 99,0 °C
  - Compatível com placas MIDI de 96 poços
- Inserções do incubador de microamostras compatíveis com placas MIDI de 96 poços
- Agitador de microplacas de alta velocidade com um intervalo de velocidades de mistura de 200 a 3000 rpm
- Suporte magnético compatível com placas de PCR de 96 poços
- Suporte magnético compatível com placas MIDI de 96 poços
- Fluorómetro compatível com o método de quantificação do utilizador
- Analisador de fragmentos de ADN
- Pipetas de precisão:
  - Pipetas de canal único e multicanal de 10  $\mu$ l
  - Pipetas de canal único e multicanal de 20  $\mu$ l
  - Pipetas de canal único e multicanal de 200  $\mu$ l
  - Pipetas de canal único de 1000  $\mu$ l
  - As pipetas de precisão garantem o fornecimento exato de reagentes e amostras. As pipetas de canal único e multicanal podem ser utilizadas se forem calibradas regularmente e se tiverem precisão dentro de 5% do volume estabelecido.
- Centrifugador de microplacas
- Microcentrífuga
- Um dos seguintes sistemas de sequenciação da Illumina:
  - MiSeqDx Instrument, catálogo n.º DX-410-1001
  - NextSeq 550Dx Instrument, catálogo n.º 20005715
  - NovaSeq 6000Dx Instrument, catálogo n.º 20068232
- **[Opcional]** Concentrador por vácuo
- **[FFPE]** Sistema de deteção de PCR em tempo real

## Materiais

Verifique se tem os materiais necessários antes de iniciar o protocolo.

Alguns artigos são apenas necessários para fluxos de trabalho específicos. Estes artigos estão especificados em tabelas separadas.

O protocolo foi otimizado e validado utilizando os artigos listados. Um desempenho equiparável não pode ser garantido utilizando materiais alternativos.

- Pontas de pipeta resistentes a aerossóis
- Tubos de centrifugação cónicos, 15 ml ou 50 ml
- Tubos de microcentrifugação de 1,5 ml
- Reservatórios descartáveis de reagente multicanal e isentos de RNase/DNase
- Tiras de 8 tubos e tampas isentas de RNase/DNase
- Pipetas serológicas
- Placa de armazenamento de poços profundos de polipropileno com 96 poços de 0,8 ml (MIDI plate, placa MIDI)
- Placas rígidas de PCR de 96 poços de saia completa
- [FFPE] Placas de PCR quantitativa compatíveis com o instrumento de PCR quantitativa
- Selos adesivos para placas de 96 poços com as seguintes especificações:
  - Poliéster ópticamente transparente e destacável
  - Adequado para placas de PCR com saia
  - Adesivo forte que resiste a múltiplas mudanças de temperatura de -40 °C a 110 °C
  - Isento de RNase/DNase
- Consumíveis de plástico compatíveis com o método de quantificação escolhido
- Kit de quantificação fluorométrica de ADN de cadeia dupla compatível com o sistema de quantificação escolhido:
  - Para quantificar bibliotecas amplificadas pré-enriquecidas, um kit de quantificação de ampla escala pode ser utilizado.
  - Para quantificar bibliotecas pré-enriquecidas, a escala do kit de quantificação depende do painel de sondas utilizado.
- Kit de análise de fragmento para classificação de biblioteca com o sistema de classificação escolhido:
  - Para classificar as bibliotecas amplificadas pré-enriquecidas, um kit de escala larga pode ser utilizado.
  - Para classificar as bibliotecas enriquecidas, a escala do kit de classificação depende do painel de sondas utilizado.
- [Opcional] Kit de extração de ADN a partir de células e tecido humanos. Qualquer método de extração validado pode ser utilizado.

# Colheita, transporte e armazenamento de espécimes



## ATENÇÃO

Manuseie todos os espécimes como se fossem agentes potencialmente infecciosos.

- Este ensaio é compatível com ADN genómico proveniente de células e tecido humanos.
- Para o ADN genómico purificado disponível comercialmente, assegure-se de que as amostras foram transportadas nas condições adequadas e armazenadas de acordo com as instruções do fabricante. Siga as boas práticas de armazenamento e de ciclos de congelação-descongelação de ADN genómico.
- Para amostras de sangue inteiro, siga as recomendações de colheita de sangue, transporte e armazenamento aplicáveis ao método de extração de ADN escolhido. Qualquer método de extração validado pode ser utilizado. O transporte de sangue inteiro tem de cumprir todos os regulamentos nacionais, federais, estaduais e locais relativos ao transporte de agentes etiológicos.
- Para a extração de ADN a partir de tecido FFPE, qualquer método de extração validado pode ser utilizado. Siga as instruções e as recomendações aplicáveis ao método de extração escolhido para verificar as seguintes práticas:
  - Método de fixação em formalina e incorporação em parafina para tecidos, para garantir ADN extraído da melhor qualidade.
  - Armazenamento de espécimes FFPE.
  - Os requisitos dos materiais de origem, tais como o número e a espessura das secções FFPE. A maioria dos métodos de purificação recomenda o uso de secções cortadas recentemente.

## Avisos e precauções

- Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit contêm químicos potencialmente perigosos. Podem ocorrer lesões pessoais por inalação, ingestão, contacto da pele e contacto ocular. Use equipamento de proteção, incluindo proteção ocular, luvas e bata de laboratório adequados para o risco de exposição. Manuseie os reagentes usados como resíduos químicos e elimine-os de acordo com a legislação e os regulamentos locais, regionais e nacionais aplicáveis. Para obter informações adicionais ambientais, de segurança e de saúde, consulte as fichas de dados de segurança (FDS) em [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).
- Manuseie todos os espécimes de sangue como se estivessem infetados com o vírus da imunodeficiência humana (VIH), o vírus humano da hepatite B (VHB) e outros agentes patogénicos transmitidos pelo sangue (precauções universais).

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Aplique as precauções de rotina do laboratório. Não coloque a pipeta na boca. Não coma, beba ou fume nas áreas designadas para trabalho. Use luvas descartáveis e batas de laboratório quando manusear espécimes e kits de reagentes. Lave bem as mãos depois de manusear espécimes e kits de reagentes.
- Para evitar a degradação da amostra ou do reagente, certifique-se de que todos os vapores de hipoclorito de sódio da limpeza estão totalmente dissipados antes de iniciar o protocolo.
- A contaminação das amostras com outros produtos/amplicões de PCR pode levar a resultados imprecisos e não confiáveis. Para evitar contaminação, utilize as seguintes boas práticas:
  - Use práticas de laboratório e higiene de laboratório adequadas.
  - Execute os passos do fluxo de trabalho nas áreas designadas para pré-amplificação e pós-amplificação.
  - Armazene os reagentes usados antes de limpar as bibliotecas na área de pré-amplificação.
  - Separe os reagentes de pré-amplificação dos reagentes de pós-amplificação.
  - Certifique-se de que as áreas de pré-amplificação e pós-amplificação têm equipamento dedicado, por exemplo, pipetas, pontas de pipeta, agitador por vórtex e centrífugador.
- Evite a contaminação cruzada. Utilize pontas de pipetas novas entre amostras e entre a distribuição de reagentes. A utilização de pontas filtradas reduz o risco de transferência de amplicões e contaminação cruzada entre amostras.
  - Ao adicionar ou transferir amostras ou misturas principais de reagentes, mude de ponta entre cada amostra.
  - Quando adicionar adaptadores de índice com uma pipeta multicanal, mude de pontas entre cada fileira ou cada coluna. Se utilizar uma pipeta de canal único, mude de pontas entre cada amostra.
  - Retire as placas de adaptador de índice não utilizadas da área de trabalho.
- Use as seguintes boas práticas para os passos de lavagem com etanol:
  - Prepare sempre uma solução nova de etanol 80%. O etanol pode absorver água do ar, podendo alterar os resultados.
  - Certifique-se de que todo o etanol é removido do fundo dos poços durante os passos de lavagem. O etanol residual pode alterar os resultados.
  - Siga os passos especificados para o tempo de secagem de suportes magnéticos para assegurar a evaporação completa. O etanol residual pode impactar o desempenho das reações subsequentes.
- Prepare sempre as misturas principais antes da sua utilização e nunca as armazene em soluções de trabalho combinadas.
- O desempenho do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não está garantido quando os procedimentos não forem seguidos tal como descrito no folheto informativo.
- Não utilize nenhum componente do kit após a data de validade especificada na etiqueta do kit.
- Não troque componentes de kit entre diferentes kits Illumina DNA Prep with Enrichment Dx. Os kits estão identificados nas etiquetas do kit.



## Notas processuais

### Recomendações sobre entradas de ADN

O protocolo do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com entradas de 50 a 1000 ng de ADN genómico de cadeia dupla e de alta qualidade.

Certifique-se de que a amostra inicial de ADN genómico não contém > 1 mM de EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid, ácido etilenodiaminotetracético) e que está isenta de contaminantes orgânicos, como fenol ou etanol. Estas substâncias podem interferir com a reação de fragmentação e marcação e levar à falha do ensaio.

#### Entrada de ADN genómico $\geq$ 50 ng

Para entradas de ADN genómico entre 50 e 1000 ng, não é necessário quantificar ou normalizar a amostra inicial de ADN genómico.

#### Entrada de ADN genómico < 50 ng

Entradas de ADN de 10 a 50 ng podem ser utilizadas, mas com os seguintes ajustes:

- Se usar uma entrada de ADN genómico entre 10 e 49 ng, é recomendado quantificar a amostra inicial de ADN genómico para determinar o número de ciclos de PCR necessários após a fragmentação e marcação. Use um método baseado em fluorometria para quantificar a entrada de ADN genómico de cadeia dupla. Evite métodos que meçam ácido nucleico total, tais como NanoDrop ou outro método de absorvência UV.
- Este protocolo não normaliza os rendimentos finais de biblioteca pré-enriquecida a partir de 10 a 49 ng de ADN genómico e, conseqüentemente, é necessário quantificar e normalizar as bibliotecas antes e após o enriquecimento.
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit foi caracterizado e verificado para entradas de ADN de 50 a 1000 ng. Um desempenho equivalente do produto não pode ser garantido com entradas de ADN genómico < 50 ng.

### Recomendações sobre entradas de sangue

O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com o ADN genómico extraído de sangue total periférico. Qualquer método de extração validado pode ser utilizado. Ao extrair ADN genómico de sangue inteiro, não é necessário realizar a classificação inicial da entrada de ADN e o Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit produz rendimentos normalizados de bibliotecas pré-enriquecidas.

Os seguintes fatores podem prejudicar a quantidade de ADN obtida a partir de amostras de sangue inteiro e, conseqüentemente, a normalização da biblioteca:

- Idade da amostra de sangue
- Condições de armazenamento

- Problemas médicos subjacentes que possam afetar as contagens de glóbulos brancos

## Recomendações sobre a entrada de amostras de tecido FFPE

Use os seguintes critérios de qualidade de ADN FFPE para determinar a entrada apropriada para uma preparação de biblioteca bem-sucedida:

- Para amostras FFPE com valor  $\Delta Cq \leq 5$ , a entrada recomendada de ADN encontra-se entre 50 e 1000 ng.
- O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx não é recomendado para amostras FFPE de fraca qualidade com  $\Delta Cq > 5$ . Utilizar amostras com  $\Delta Cq > 5$  é possível, mas pode aumentar a probabilidade de falha de preparação da biblioteca ou diminuir o desempenho do ensaio.

### Extração a partir de amostras FFPE

Use um método de isolamento de ácido nucleico que produza rendimentos de recuperação elevados, minimize o consumo de amostra e preserve a integridade da amostra. Pode utilizar qualquer método validado de extração de ADN a partir de amostras FFPE. Para ADN genómico extraído de tecido FFPE, é necessário realizar a quantificação inicial da entrada de ADN e o Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não produz os rendimentos normalizados de bibliotecas pré-enriquecidas.

### Classificação de ADN extraído de amostras FFPE

O ADN genómico extraído de tecido FFPE pode ser classificado antes da sua utilização. Para um ótimo desempenho, avalie a qualidade da amostra de ADN usando um método de extração validado para a classificação de ADN extraído de amostras FFPE. O protocolo do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é compatível com amostras de ADN FFPE com um valor de  $\Delta Cq \leq 5$ . O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit não é recomendado para amostras FFPE de fraca qualidade com  $\Delta Cq > 5$ . Utilizar amostras com  $\Delta Cq > 5$  é possível, mas pode aumentar a probabilidade de falha de preparação da biblioteca ou diminuir o desempenho do ensaio.

### [Opcional] Amostras de referência FFPE

Utilize materiais de referência caracterizados, tais como o Horizon HD799 (DNA), como controlo positivo quando executar o protocolo. Materiais FFPE classificados a partir de linhas celulares derivadas de xenoinxertos também podem ser utilizados como amostras de referência. Use um método baseado em fluorimetria para quantificar os materiais de referência antes da sua utilização.

**NOTA** A realização de um ensaio com uma amostra de referência de controlo positivo ou controlo sem modelo consome reagentes e reduz o número total de amostras desconhecidas que é possível processar.

## With Enrichment Dx

## Recomendações sobre a entrada de amostras

As recomendações sobre a entrada de amostras para o Illumina DNA Prep with Enrichment Kit estão sumarizadas na seguinte tabela.

Tabela 1 Recomendações sobre a entrada de amostras

Tipo de entrada de amostra	Quantidade de entrada de amostra	Quantificação da entrada do ADN necessária	Qualidade da entrada do ADN necessária	Rendimento normalizado de biblioteca pré-enriquecida
ADN genómico	10 a 49 ng	Sim	Rácio 260/280 de 1,8 a 2,0	Não
ADN genómico	50 a 1000 ng	Não	Rácio 260/280 de 1,8 a 2,0	Sim
ADN genómico extraído de sangue	50 a 1000 ng	Não	Rácio 260/280 de 1,8 a 2,0	Sim
ADN genómico de amostras FFPE	50 a 1000 ng	Sim	Valor $\Delta Cq \leq 5$	Não

Os ciclos de PCR recomendados para o programa eBLTS PCR são ajustados com base na concentração e qualidade da entrada de amostras. Para mais informações, consulte [Amplificar ADN fragmentado e marcado na página 30](#).

## Sugestões e técnicas

### Evitar a contaminação cruzada

- Ao adicionar ou transferir amostras, mude de ponta entre *cada amostra*.
- Quando adicionar adaptadores de índice com uma pipeta multicanal, mude de pontas entre *cada fileira* ou *cada coluna*. Se utilizar uma pipeta de canal único, mude de pontas entre cada amostra.

### Selar a placa

- Sele sempre a placa de 96 poços com um selo adesivo novo, usando o rolo de borracha para cobrir a placa antes dos seguintes passos do protocolo:
  - Passos de agitação
  - Passos de incubação. Uma falha a selar a placa adequadamente pode levar à evaporação durante a incubação.
  - Passos de centrifugação
  - Passos de hibridização

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Certifique-se de que os bordos e os poços estão completamente selados para reduzir o risco de contaminação e evaporação.
  - Se observar qualquer fluido ou condensação no selo ou bordos dos poços da placa, centrifugue conforme necessário antes de retirar o selo.
- Coloque a placa numa superfície plana antes de remover lentamente o selo.


## **Manusear o Enrichment BLT Small (BLT de enriquecimento pequeno) (eBLTS)**

- Armazene o tubo de armazenamento de eBLTS na vertical, no frigorífico, de forma que as esferas estejam sempre submersas na solução tampão.
- Imediatamente antes da sua utilização, agite completamente por vórtex o tubo de armazenamento de eBLTS até as esferas ficarem ressuspensas. Para evitar a sedimentação das esferas, a centrifugação antes da pipetagem não é recomendada.
- Se as esferas aderirem aos bordos ou ao topo da placa de 96 poços, centrifugue a  $280 \times g$  durante 3 segundos e, em seguida, pipete para ressuspender.
- Durante a lavagem de eBLTS:
  - Utilize o suporte magnético adequado para a placa.
  - Mantenha a placa no suporte magnético até instruções que especifiquem a sua remoção.
  - Se as esferas forem aspiradas para as pontas de pipeta, dispense de volta para a placa no suporte magnético e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).

## With Enrichment Dx

## Fluxo de trabalho do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit

O seguinte diagrama ilustra o fluxo de trabalho do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit. Os pontos de paragem de segurança estão marcados entre os passos. As estimativas de tempo são baseadas no processamento de 12 amostras com enriquecimento 12-plex.

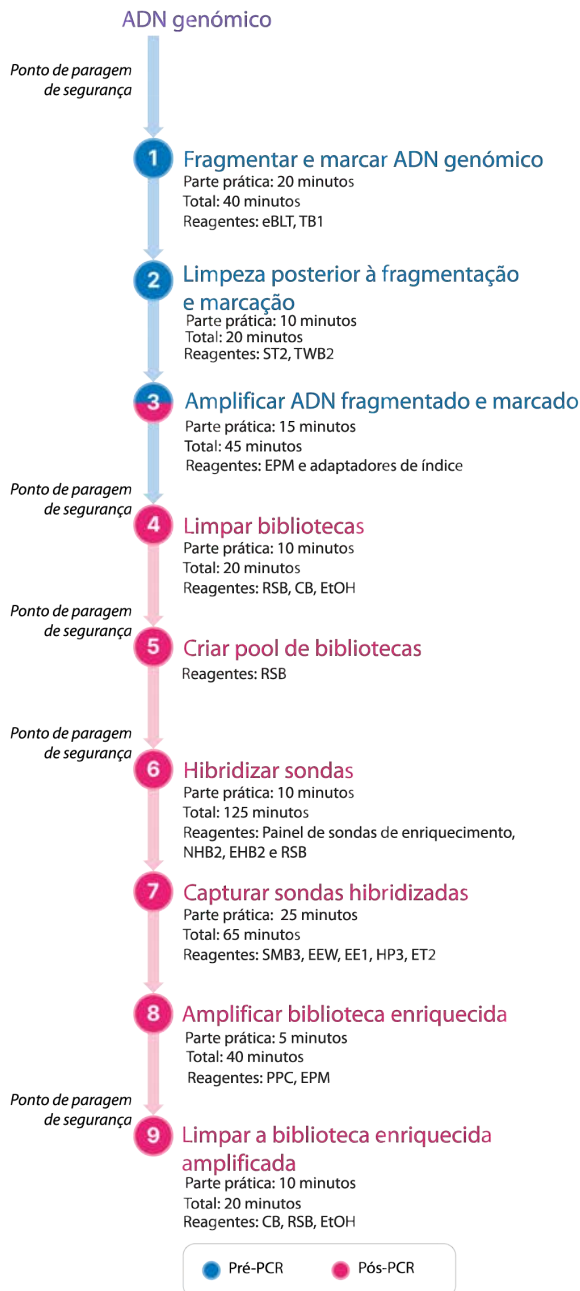

## Instruções de utilização

Este capítulo descreve o fluxo de trabalho do protocolo do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit.

- Reveja o fluxo de trabalho da sequenciação planeado por completo, desde a amostragem à análise, de forma a assegurar a compatibilidade dos produtos e parâmetros da experiência.
- Antes de continuar, confirme os conteúdos do kit e certifique-se de que tem os componentes, o equipamento e os materiais necessários.
  - As sondas biotiniladas de terceiros devem cumprir os requisitos especificados. Consulte [Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento na página 11](#) para se certificar de que as suas sondas de terceiros cumprem os requisitos.
- Siga o protocolo pela ordem apresentada, utilizando os volumes e parâmetros de incubação especificados.
- A menos que seja especificado um ponto de paragem de segurança no protocolo, avance imediatamente para o passo seguinte.
- Ao criar uma mistura principal, o excedente é incluído nos volumes fornecidos.
- Certifique-se de que utiliza o suporte magnético adequado para o tipo de placa.

## Preparação para pooling

Este passo é necessário para assegurar uma sequenciação bem-sucedida das bibliotecas enriquecidas. O pooling de bibliotecas pode ocorrer antes do enriquecimento e da sequenciação.

**Antes do enriquecimento** — As bibliotecas individuais amplificadas e indexadas são agrupadas num pool para enriquecimento com o painel de sonda selecionado. Isto cria um pool multiplexado de bibliotecas enriquecidas. Para a entrada de amostras FFPE, o processamento foi testado e é recomendado exclusivamente para reações de enriquecimento 1-plex. Para ADN genómico de alta qualidade, foi testado o 12-plex, mas é possível do 2-plex ao 11-plex.

**Antes da sequenciação** — As bibliotecas enriquecidas singleplex e/ou as bibliotecas enriquecidas multiplex são agrupadas num pool antes da sequenciação. O número de bibliotecas enriquecidas que pode ser sequenciado depende da profundidade de leitura alvo para cada amostra no seu sistema de sequenciação.

## Indexação dual única

O Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit usa índices duais únicos (unique dual indexes, UDP).

- As bibliotecas duplamente indexadas adicionam sequências de índice 1 (i7) e índice 2 (i5) para gerar bibliotecas marcadas de forma única.
- Os índices duais únicos têm sequências de índices distintas e independentes para a leitura de índice i7 e i5. Os índices têm 10 bases de comprimento.

## With Enrichment Dx

Selecionar adaptadores de índice com sequências diversificadas para bibliotecas em pool otimiza o equilíbrio de cores para uma sequenciação e uma análise de dados bem-sucedidas. Pools de plexagem que sejam  $\geq 10$ -plex são inerentemente equilibrados por cor, de forma a poder utilizar qualquer combinação de adaptadores de índice. Durante o seu ensaio de sequenciação, o DNA GenerateFASTQ Dx Local Run Manager Module fornece opções para combinações de índice equilibradas por cor e notifica o utilizador se não houver diversidade suficiente nas combinações de índice selecionadas.

Para mais informações sobre sequências do adaptador de índice dual único da Illumina e disposições de placas, consulte [Anexo: Sequências de adaptador de índice dual único da Illumina na página 63](#)

### Plexagens de enriquecimento compatíveis

Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit estão configurados e testados em plexagens de enriquecimento de 1-plex e 12-plex. Apesar de outras plexagens de enriquecimento serem possíveis, algumas plexagens requerem preparação de bibliotecas pré-enriquecidas e reagentes de painéis de sondas de enriquecimento adicionais.

Para obter rendimentos de enriquecimento adequados para plexagens não standard, poderá ser necessária uma otimização adicional. Não estão garantidos resultados otimizados.

- **Plexagem de enriquecimento** – O número de bibliotecas pré-enriquecidas (1 a 12) agrupadas num pool numa reação de enriquecimento para hibridização com os painéis de sondas de enriquecimento. Por exemplo, combinar 12 bibliotecas pré-enriquecidas cria um pool de enriquecimento 12-plex.
- **Reação de enriquecimento** – O número de preparações de reação de enriquecimento únicas, independentemente do número de bibliotecas pré-enriquecidas num pool por reação. Por exemplo, uma reação de enriquecimento única pode preparar um pool de enriquecimento 1-plex ou 12-plex.

Para calcular o número total de bibliotecas pós-enriquecidas, multiplique a plexagem de enriquecimento por reação pelo número de reações de enriquecimento. Por exemplo, uma reação única de um pool de enriquecimento 12-plex produz um pool de 12 bibliotecas pós-enriquecidas.

Ao criar o pool de bibliotecas pré-enriquecidas, os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit são compatíveis com as seguintes reações e plexagens de enriquecimento.

Reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit	Reações de enriquecimento	Plexagem de enriquecimento
Kit de 16 amostras	16 reações	1-plex
Kit de 96 amostras	8 reações	12-plex

### Estratégias de pooling 2-Plex a 8-Plex


A tabela seguinte mostra adaptadores de índice (poços) que podem ser combinados num pool de 2 a 8 plex, enquanto a figura codificada por cores ilustra cada combinação.

Faça o pooling de qualquer plexagem  $\geq 2$  a partir do topo ou do fundo de cada coluna. Não faça o pooling seguindo uma linha.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Plexagem	Combinações	Cor na figura
2	Os primeiros dois ou os últimos dois poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A e B</li><li>• G e H</li></ul> As linhas C–F não são utilizadas.	Laranja
3	Os primeiros três ou os últimos três poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A a C</li><li>• F a H</li></ul> As linhas D e E não são utilizadas.	Cinzeno
4	Os primeiros quatro ou os últimos quatro poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A a D</li><li>• E a H</li></ul>	Roxo
5	Os primeiros cinco ou os últimos cinco poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A a E</li><li>• D a H</li></ul>	Azul
6	[Opção 1] Os primeiros seis ou os últimos seis poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A a F</li><li>• C a H</li></ul> [Opção 2] Os primeiros dois poços (A e B) ou os últimos dois poços (G e H) numa coluna e quaisquer quatro poços numa coluna adjacente.	Verde
7	Os primeiros sete ou os últimos sete poços numa coluna: <ul style="list-style-type: none"><li>• A a G</li><li>• B a H</li></ul>	Rosa
8	A coluna inteira.	Azul petróleo



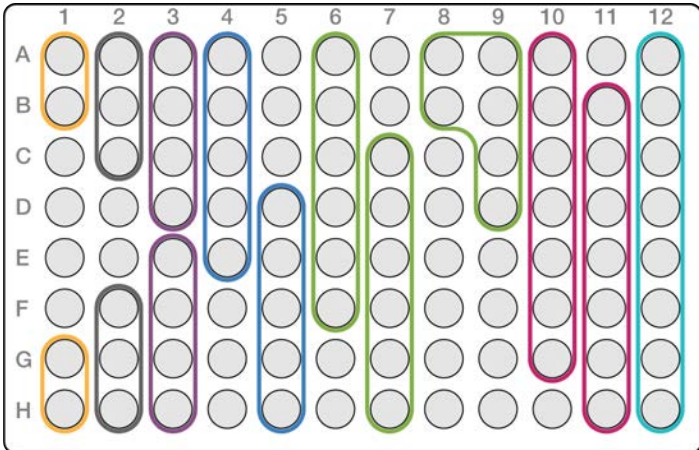


### Estratégias de pooling 9-Plex

Utilize adaptadores de índice de quaisquer poços para otimizar o equilíbrio de cores num ensaio de sequenciação, por exemplo:

- A1 a H1 e A2
- A4 a D4 e A5 a E5
- A7 a F7 e A8 a C8
- A10 a C10, A11 a C11 e A12 a C12

A figura seguinte demonstra os quatro exemplos.

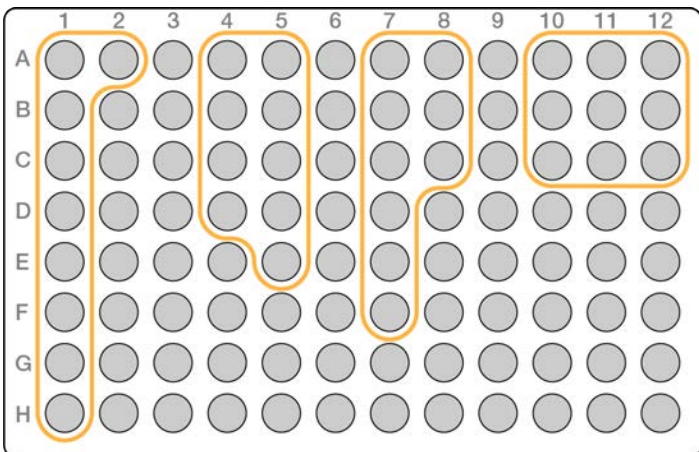

### Fragmentar e marcar ADN genómico

Este passo utiliza Enrichment BLT Small (BLT de enriquecimento pequeno) (eBLTS) para a fragmentação e marcação de ADN, que é um processo que fragmenta e marca o ADN com sequências do adaptador.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Consumíveis

- eBLTS (Enrichment BLT Small; BLT de enriquecimento pequeno) (tampa amarela)
- TB1 (Tagmentation Buffer 1; Tampão de fragmentação e marcação 1)
- Água isenta de nuclease
- Placa de PCR de 96 poços
- Selo adesivo
- Tubos de microcentrifugação de 1,7 ml
- Tira de 8 tubos
- Pontas de pipeta
  - Pipetas multicanal de 200 µl



## ATENÇÃO

**Este conjunto de reagentes contém químicos potencialmente perigosos. Podem ocorrer lesões pessoais por inalação, ingestão, contacto da pele e contacto ocular. Use equipamento de proteção, incluindo proteção ocular, luvas e bata de laboratório adequados para o risco de exposição. Manuseie os reagentes usados como resíduos químicos e elimine-os de acordo com a legislação e os regulamentos locais, regionais e nacionais aplicáveis. Para obter informações adicionais ambientais, de segurança e de saúde, consulte as fichas de dados de segurança (FDS) em [support.illumina.com/sds.html](http://support.illumina.com/sds.html).**

## Sobre reagentes

- O eBLTS tem de ser armazenado a temperaturas entre os 2 °C e os 8 °C. Não utilize eBLTS que tenha sido armazenado a temperaturas inferiores a 2 °C.
- Não centrifugue eBLTS.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
eBLTS (tampa amarela)	2 °C a 8 °C	Leve à temperatura ambiente. Agite por vórtex imediatamente antes da utilização para misturar. Não centrifugue antes de pipetar.
TB1	-25 °C a -15 °C	Leve à temperatura ambiente. Agite por vórtice para misturar.

2. Agite por vórtex ou pipete o ADN e, em seguida, centrifugue brevemente.
3. Guarde o seguinte programa TAG no termociclador:

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Escolha a opção de tampa pré-aquecida e regular a 100 °C
- Defina o volume de reação para 50 µl
- 55 °C durante 5 minutos
- Mantenha a 10 °C

## Procedimento

1. Adicione 2 a 30 µl de ADN a cada poço de uma placa de 96 poços, de forma que a quantidade de entrada total seja de 50 a 1000 ng.  
Se o volume de ADN for < 30 µl, adicione água isenta de nuclease às amostras de ADN para atingir um volume total de 30 µl.
2. Agite o eBLTS por vórtex completamente até que as esferas estejam totalmente ressuspensas.
3. Combine os seguintes volumes num tubo para preparar a Tagmentation Master Mix (Mistura principal de fragmentação e marcação). Multiplique cada volume pelo número de amostras a serem processadas.
  - eBLTS (11,5 µl)
  - TB1 (11,5 µl)O excedente de reagente está incluído no volume.
4. Pipete a Tagmentation Master Mix (Mistura principal de fragmentação e marcação) completamente para misturar.
5. Divida o volume da Tagmentation Master Mix (Mistura principal de fragmentação e marcação) igualmente para uma tira de 8 tubos.
6. Usando uma pipeta multicanal de 200 µl, transfira 20 µl da Tagmentation Master Mix (Mistura principal de fragmentação e marcação) para cada poço de uma placa de PCR contendo a amostra. Use pontas novas para cada coluna ou linha de amostras.
7. Elimine a tira de 8 tubos depois de dispensar a Tagmentation Master Mix (Mistura principal de fragmentação e marcação).
8. Utilizando uma pipeta multicanal de 200 µl regulada para 40 µl, pipete cada amostra 10 vezes para misturar. Utilize pontas novas para cada coluna de amostra.  
Em alternativa, sele a placa de PCR e agite a 1600 rpm durante 1 minuto.
9. Sele a placa e, em seguida, coloque no termociclador pré-programado e execute o programa TAG.
10. Espere até que o programa TAG tenha atingido uma temperatura de manutenção de 10 °C e, em seguida, remova a placa imediatamente.
11. Deixe a placa de PCR de 96 poços ficar à temperatura ambiente durante 2 minutos e, em seguida, avance para o passo seguinte.

## Limpeza posterior à fragmentação e marcação

Este passo lava o ADN marcado por adaptador com o eBLTS antes da amplificação da PCR.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Consumíveis

- ST2 (Stop Tagment Buffer 2; Tampão de fragmentação e marcação de paragem 2)
- TWB2 (Tagment Wash Buffer 2; Tampão de lavagem de fragmentação e marcação 2)
- Suporte magnético de placas de PCR com 96 poços
- Selo adesivo
- Tira de 8 tubos
- Pontas de pipeta
  - Pipetas multicanal de 20 µl
  - Pipetas multicanal de 200 µl
- Prepare para procedimento posterior:
  - EPM (Enhanced PCR Mix; Mistura PCR melhorada)
  - Placa de adaptador de índice

## Sobre reagentes

- Certifique-se de que utiliza o suporte magnético adequado para a sua placa. Utilizar um suporte magnético de placas MIDI para uma placa de PCR pode prevenir a aderência entre o TWB2 e as esferas.
- Pipete o TWB2 lentamente para minimizar a formação de espuma e de forma a evitar uma aspiração incorreta de volumes e uma mistura incompleta.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
EPM	-25 °C a -15 °C	Descongele em gelo durante uma hora. Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente.
ST2	15 °C a 30 °C	Se forem observados precipitados, aqueça a 37 °C durante 10 minutos e, em seguida, agite por vórtex até os precipitados estarem dissolvidos. Utilize à temperatura ambiente.
TWB2	15 °C a 30 °C	Utilize à temperatura ambiente.
Placa de adaptador de índice	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente durante 30 minutos.

## Procedimento

1. Adicione 10 µl de ST2 a cada reação de fragmentação e marcação. Se estiver a usar uma pipeta multicanal, pipete o ST2 para uma tira de 8 tubos e, em seguida, transfira os volumes apropriados para a placa de PCR. Use pontas novas para cada coluna ou linha de amostras.
2. Utilizando uma pipeta de 200 µl regulada para 50 µl, pipete lentamente cada poço 10 vezes para ressuspender as esferas.  
Em alternativa, sele a placa e agite a 1600 rpm durante 1 minuto. Repita conforme necessário.
3. Sele a placa da amostra e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
4. Incube à temperatura ambiente durante 5 minutos.
5. Coloque no suporte magnético de placas de PCR e espere até o líquido ficar límpido (3 minutos).
6. [≤ 48 amostras] Lave três vezes da seguinte forma.
  - a. Utilizando uma pipeta multicanal de 200 µl regulada para 60 µl, remova e descarte o sobrenadante sem perturbar os sedimentos de esferas.
  - b. Retire do suporte magnético.
  - c. Imediatamente a seguir, adicione lentamente 100 µl de TWB2 diretamente sobre as esferas.
  - d. Pipete lentamente até as esferas estarem completamente ressuspensas. Em alternativa, sele a placa e agite a 1600 rpm durante 1 minuto.
  - e. Se ocorrerem salpicos, centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
  - f. Coloque no suporte magnético de placas de PCR e espere até o líquido estar límpido (3 minutos). Quando executar a terceira lavagem, deixe a placa no suporte magnético e o TWB2 nos poços para prevenir desidratação. Remova e elimine o sobrenadante após ter preparado a PCR Master Mix (Mistura principal PCR).
  - g. Utilizando uma pipeta multicanal de 200 µl regulada para 100 µl, remova e elimine o sobrenadante.
  - h. Repita os passos c a f duas vezes para um total de três lavagens.
7. [> 48 amostras] Lave três vezes da seguinte forma.
  - a. Execute os passos b e c em incrementos de 1 a 2 colunas até todas as colunas terem sido processadas, de forma a prevenir desidratação.
  - b. Utilizando uma pipeta multicanal de 200 µl regulada para 60 µl, remova e elimine o sobrenadante.
  - c. Retire do suporte magnético.
  - d. Imediatamente a seguir, adicione lentamente 100 µl de TWB2 diretamente sobre as esferas.
  - e. Pipete lentamente até as esferas estarem completamente ressuspensas. Em alternativa, sele a placa e agite a 1600 rpm durante 1 minuto.
  - f. Se ocorrerem salpicos, centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
  - g. Coloque no suporte magnético de placas de PCR e espere até o líquido estar límpido (3 minutos). Quando executar a terceira lavagem, deixe a placa no suporte magnético e o TWB2 nos poços para prevenir desidratação. Remova e elimine o sobrenadante após ter preparado a PCR Master Mix (Mistura principal PCR).

- h. Utilizando uma pipeta multicanal de 200 µl regulada para 100 µl, remova e elimine o sobrenadante.
  - i. Retire do suporte magnético e adicione lentamente 100 µl de TWB2 diretamente sobre as esferas.
  - j. Repita os passos h e i em incrementos de 1 ou 2 colunas até todas as colunas terem sido processadas.
  - k. Repita os passos e a h duas vezes para um total de três lavagens.
8. Mantenha no suporte magnético até ao passo 4 da secção *Procedimento em Amplificar ADN fragmentado e marcado*.
- O TWB2 permanece nos poços para prevenir desidratação das esferas.

## Amplificar ADN fragmentado e marcado

Este passo amplifica o ADN fragmentado e marcado usando um programa para PCR de ciclo limitado. O passo PCR adiciona adaptadores de índice 1 (i7) e índice 2 (i5) e sequências necessárias para a geração de clusters de sequenciação.

### Consumíveis

- EPM (Enhanced PCR Mix; Mistura PCR melhorada)
- Placa de adaptador de índice
- Placa de PCR de 96 poços
- Água isenta de nuclease
- Selo adesivo
- Tubos de microcentrifugação de 1,5 ml
- Pontas de pipeta
  - Pipetas multicanal de 20 µl
  - Pipetas multicanal de 200 µl

### Sobre reagentes

- Placas de adaptador de índice
  - Um poço pode conter > 10 µl de adaptadores de índice.
  - Não adicione amostras à placa de adaptador de índice.
  - Cada poço da placa de índice é para utilização única.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
EPM	-25 °C a -15 °C	Descongele a 4 °C ou em gelo durante 1 hora. Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente.
Placa de adaptador de índice	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente durante 30 minutos.

2. Guarde o seguinte programa eBLTS PCR num termociclador usando o número apropriado de ciclos PCR indicados na tabela abaixo.

- Escolha a opção de tampa pré-aquecida e regular a 100 °C
- Defina o volume de reação para 50 µl
- 72 °C durante 3 minutos
- 98 °C durante 3 minutos
- X ciclos de:
  - 98 °C durante 20 segundos
  - 60 °C durante 30 segundos
  - 72 °C durante 1 minuto
- 72 °C durante 3 minutos
- Mantenha a 10 °C

O tempo total de execução é ~38 minutos para 9 ciclos e ~46 minutos para 12 ciclos.

Tipo de entrada de amostra	Número de ciclos (X) de PCR
10 a 49 ng de ADN genómico	12
50 a 1000 ng de ADN genómico	9
50 a 1000 ng de ADN genómico extraído de amostras FFPE	12
ADN genómico extraído de sangue	9

## Procedimento

1. Combine os seguintes para preparar a PCR Master Mix (Mistura principal PCR). Multiplique cada volume pelo número de amostras a serem processadas.

- EPM (23 µl)
- Água isenta de nuclease (23 µl)

O excedente de reagente está incluído no volume.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

2. Pipete a PCR Master Mix (Mistura principal PCR) 10 vezes para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente.
3. Com a placa no suporte magnético, utilize uma pipeta multicanal de 200 µl para remover e eliminar TWB2. A espuma que ficar nos bordos do poço não prejudica a biblioteca.
4. Retire do suporte magnético.
5. Adicione imediatamente 40 µl de PCR Master Mix (Mistura principal PCR) diretamente sobre as esferas de cada poço.
6. Pipete imediatamente para misturar até as esferas estarem completamente ressuspensas. Em alternativa, sele a placa e agite a 1600 rpm durante 1 minuto.
7. Sele a placa da amostra e centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
8. Centrifugue a placa de adaptador de índice a 1000 × g durante 1 minuto.
9. Prepare a placa de adaptador de índice.
  - [< 96 amostras] Perfure o selo de alumínio na placa de adaptador de índice com uma nova ponta de pipeta para cada poço, mas apenas para o número de amostras a serem processadas.
  - [96 amostras] Alinhe uma nova placa de PCR com saia parcial por cima da placa de adaptador de índice e pressione para baixo de forma a perfurar o selo de alumínio. Elimine a placa de PCR usada para perfurar o selo de alumínio.
10. Utilizando uma nova ponta de pipeta, adicione 10 µl de adaptadores de índice pré-emparelhados a cada poço.
11. Utilizando uma pipeta regulada para 40 µl, pipete 10 vezes para misturar. Em alternativa, sele a placa e agite a 1600 rpm durante 1 minuto.
12. Sele a placa da amostra e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
13. Coloque no termociclador e execute o programa eBLTS PCR.

## PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, armazene entre -25 °C e -15 °C até um máximo de 30 dias.

## Limpar bibliotecas

Este passo utiliza o procedimento de purificação de esferas de dupla face para purificar as bibliotecas amplificadas.

### Consumíveis

- CB (Cleanup Beads; Esferas de limpeza)
- RSB (Resuspension Buffer; Tampão de ressuspensão)
- Etanol (EtOH) 80%, preparado de novo
- Placa de armazenamento de poços profundos de polipropileno com 96 poços de 0,8 ml (MIDI plate, placa MIDI)



# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Placa de PCR de 96 poços
- Suporte magnético de placas MIDI
- Suporte magnético de placas de PCR
- Tubos de microcentrifugação de 1,5 ml
- Água isenta de nuclease

## Sobre reagentes

- Cleanup Beads (Esferas de limpeza)
  - Agite por vórtex antes de cada utilização.
  - Agite por vórtex frequentemente de forma a assegurar que as esferas estão distribuídas uniformemente.
  - Aspire e dispense lentamente devido à viscosidade da solução.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
CB	Temperatura ambiente	Agite por vórtex e inverta para misturar até à cor do líquido ficar homogénea.
RSB	2 °C a 8 °C	Descongele à temperatura ambiente durante 30 minutos. Agite por vórtice para misturar.

## Procedimento

1. Agite a placa de PCR de 96 poços a 1800 rpm durante 1 minuto e, em seguida, centrifugue brevemente.
2. Coloque num suporte magnético de placas de PCR e espere até o líquido ficar límpido (1 minuto).
3. Agite as esferas de limpeza por vórtex 3 vezes durante 10 segundos, invertendo em seguida várias vezes para ressuspender.
4. Para ADN genómico de alta qualidade, faça o seguinte.
  - a. Adicione 77 µl de água isenta de nuclease a cada poço da nova placa MIDI.
  - b. Adicione 88 µl de esferas de limpeza a cada poço da placa MIDI.
  - c. Transfira 45 µl do sobrenadante de cada poço da placa de PCR para o poço correspondente da placa MIDI.
  - d. Elimine a placa de PCR.
  - e. Pipete cada poço 10 vezes para misturar. Em alternativa, sele a placa e agite a 1800 rpm durante 1 minuto.
  - f. Sele a placa e incube à temperatura ambiente durante 5 minutos.

## With Enrichment Dx

- g. Verifique se há bolhas de ar. Se observadas, centrifugue.
  - h. Coloque no suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (5 minutos).
  - i. Durante a incubação, agite as esferas de limpeza exaustivamente por vórtex e, em seguida, adicione 20 µl a cada poço de uma *nova* placa MIDI.
  - j. Transfira 200 µl do sobrenadante de cada poço da primeira placa MIDI para o poço correspondente da nova placa MIDI (que contém 20 µl de esferas de limpeza).
  - k. Elimine a primeira placa MIDI.
  - l. Pipete cada poço da nova placa MIDI 10 vezes para misturar. Em alternativa, sele a placa e agite a 1800 rpm durante 1 minuto.
5. Para ADN genómico extraído de amostras FFPE, faça o seguinte.
- a. Adicione 81 µl de esferas de limpeza a cada poço da nova placa MIDI.
  - b. Transfira 45 µl do sobrenadante de cada poço da placa de PCR para o poço correspondente da placa MIDI.
  - c. Elimine a placa de PCR.
  - d. Pipete cada poço 10 vezes para misturar. Em alternativa, sele a placa e agite a 1800 rpm durante 1 minuto.
6. Incube à temperatura ambiente durante 5 minutos.
7. Verifique se há bolhas de ar. Se observadas, centrifugue.
8. Coloque no suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (5 minutos).
9. Sem perturbar as esferas, remova e elimine o sobrenadante.
10. Lave as esferas da seguinte forma.
- a. Com a placa no suporte magnético, adicione 200 µl de solução nova de EtOH 80% sem misturar.
  - b. Incube durante 30 segundos.
  - c. Sem perturbar as esferas, remova e elimine o sobrenadante.
11. Lave as esferas uma **segunda** vez.
12. Seque ao ar no suporte magnético durante 5 minutos.
13. Ao secar ao ar, utilize uma pipeta de 20 µl para remover e eliminar EtOH residual.
14. Retire do suporte magnético.
15. Adicione 17 µl de RSB às esferas.
16. Sele a placa e agite a 1800 rpm durante 2 minutos.
17. Incube à temperatura ambiente durante 2 minutos.
18. Verifique se há bolhas de ar. Se observadas, centrifugue.
19. Coloque a placa no suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).
20. Transfira 15 µl de sobrenadante para uma nova placa de PCR de 96 poços.

### PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, sele a placa e armazene entre -25 °C e -15 °C até um máximo de 30 dias.

## Criar pool de bibliotecas pré-enriquecidas

Este passo combina bibliotecas de ADN com índices únicos num pool de até 12 bibliotecas.

### Métodos de pooling

Pode criar o pool por volume ou massa. Use a seguinte tabela para determinar o método apropriado para a sua entrada.

Tabela 2 Métodos recomendados de pooling

Entrada de amostras	Método de pooling
10 a 49 ng de ADN genómico	Massa
50 a 1000 ng de ADN genómico	Volume
ADN genómico extraído de amostras FFPE	Massa
ADN genómico extraído de sangue	Volume

- O enriquecimento 1-plex não requer pooling de bibliotecas pré-enriquecidas. Contudo, pode ser necessário adicionar RSB.
- Após a quantificação de biblioteca pré-enriquecida, todos os tipos de entrada de amostra podem ser criar um pool por massa para atingir um equilíbrio de índices ótimo.
- O rendimento final de bibliotecas pré-enriquecidas geradas em preparações experimentais diferentes pode variar. Consequentemente, o pooling por massa é recomendado para atingir um equilíbrio de índices ótimo.
- Use o enriquecimento 1-plex para as seguintes situações.
  - 10 a 49 ng de ADN genómico
  - 50 a 1000 ng de ADN genómico extraído de amostras FFPE
  - Detecção baixa de frequências alélicas menores para identificação de variante somática

### Pool por massa

Para as seguintes situações, quantifique as suas bibliotecas para utilizar a massa de ADN por biblioteca para o enriquecimento especificado em [Criar pool de bibliotecas pré-enriquecidas a concentrações iguais na página 36](#).

- 10 a 49 ng de entrada de amostras de ADN genómico
- 50 a 1000 ng de ADN genómico extraído de uma entrada de amostras FFPE
- Detecção baixa de frequências alélicas menores para identificação de variante somática
- ADN genómico extraído de sangue para um equilíbrio de índices ótimo

## Quantificar bibliotecas pré-enriquecidas

1. Realize um ensaio com 1 µl de bibliotecas pré-enriquecidas usando o seu método preferido de quantificação baseado em fluorescência que utilize corante intercalado de ADN de cadeia dupla.
  - Para 50 a 1000 ng de ADN genómico de alta qualidade, pode contar com um rendimento de biblioteca pré-enriquecida de  $\geq 500$  ng.
  - Para 50 a 1000 ng de ADN genómico extraído de amostras FFPE, pode-se contar com um rendimento de biblioteca pré-enriquecida entre 500 e 6000 ng, dependendo da qualidade da amostra inicial.

**NOTA** Para métodos de quantificação com vieses diferentes, classifique o método de quantificação para este fluxo de trabalho. Os resultados de concentração podem variar dependendo do método utilizado.

## Criar pool de bibliotecas pré-enriquecidas a concentrações iguais

Use a seguinte tabela para determinar a massa necessária de ADN por biblioteca para o enriquecimento, de acordo com o tipo de amostra e a plexagem de enriquecimento. Não são garantidos os melhores rendimentos de enriquecimento e desempenho de ensaio se forem usados rendimentos de bibliotecas pré-enriquecidas menores que o recomendado.

A massa total de ADN na reação de enriquecimento não deve exceder 6000 ng.

Entrada de amostras	Plexagem de enriquecimento	Massa de ADN por biblioteca (ng)	Massa total de biblioteca de ADN (ng)
ADN genómico de alta qualidade	12	250 a 500	3000 a 6000
ADN genómico extraído de amostras FFPE	1	200	200

1. Registe os índices para as bibliotecas com as quais planeia fazer o pool neste passo.
2. Com base na concentração de cada biblioteca, calcule o volume que deve ser adicionado à reação de enriquecimento para atingir a massa de ADN necessária.
  - ADN genómico de alta qualidade: calcule o volume de biblioteca necessário para uma entrada de 250 a 500 ng.
  - ADN genómico extraído de amostras FFPE: calcule o volume de biblioteca necessário para uma entrada de 200 ng.
3. Adicione o volume calculado para cada biblioteca no mesmo poço da placa de PCR.
4. Se estiver a usar ADN genómico de alta qualidade, execute, de acordo com o volume total de bibliotecas pré-enriquecidas do pool, um dos seguintes passos:

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Se o volume de biblioteca pré-enriquecida for igual a 30 µl, continue para o passo [Hibridizar sondas na página 38](#).
  - Se o volume de biblioteca pré-enriquecida for < 30 µl, adicione RSB até atingir 30 µl de volume total.
  - Se o volume de biblioteca pré-enriquecida for > 30 µl, use um método baseado em esferas ou um concentrador de vácuo para concentrar a amostra combinada. Adicione RSB à amostra combinada concentrada até atingir 30 µl de volume total.
5. Se estiver a usar ADN genómico extraído de amostras FFPE, siga um dos seguintes passos com base no volume total de bibliotecas pré-enriquecidas do pool.
- Se o volume de biblioteca pré-enriquecida for igual a 7,5 µl, continue para o passo [Hibridizar sondas na página 38](#).
  - Se o volume de biblioteca pré-enriquecida for < 7,5 µl, adicione RSB até atingir 7,5 µl de volume total.

## PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, sele a placa e armazene entre -25 °C to -15 °C até um máximo de 30 dias.

## Pool por volume

Quando a entrada de ADN genómico é de 50 a 1000 ng, não é necessário quantificar ou normalizar bibliotecas individuais geradas na mesma experiência.

Para atingir o melhor desempenho possível, crie pools apenas com amostras de bibliotecas pré-enriquecidas preparadas pelo mesmo utilizador, lote de reagente e placa de adaptador de índice.

1. Registe os índices para as bibliotecas com as quais planeia fazer o pool neste passo.
2. Combine os seguintes volumes de biblioteca pré-enriquecida e de RSB para a sua plexagem de enriquecimento no mesmo poço de uma nova placa de PCR.

O volume resultante é 30 µl.

Plexagem de enriquecimento *	Cada volume de biblioteca pré-enriquecida (µl)	Volume de RSB (µl)
1-plex	14	16
2-plex	14	2
3-plex	10	0
4-plex	7,5	0
5-plex	6	0
6-plex	5	0
7-plex	4,2	0,6
8-plex	3,7	0,4

Plexagem de enriquecimento *	Cada volume de biblioteca pré-enriquecida (µl)	Volume de RSB (µl)
9-plex	3,3	0,3
10-plex	3	0
11-plex	2,7	0,3
12-plex	2,5	0

\*Para informações sobre plexagens não standard (2-plex a 11-plex), consulte [Limitações do procedimento na página 2](#).

## PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, sele a placa e armazene entre -25 °C to -15 °C até um máximo de 30 dias.

## [Opcional] Classificar bibliotecas pré-enriquecidas

Se fizer o pooling por volume, use um método baseado em fluorometria que use corante intercalado de ADN de cadeia dupla para quantificar as bibliotecas pré-enriquecidas. Para classificar as bibliotecas pré-enriquecidas, use um analisador de fragmentos de ADN com o kit de análise de fragmentos apropriado.

Use, no total, 1 µl para a classificação de bibliotecas. As bibliotecas pré-enriquecidas são suficientemente concentradas para permitir pequenas diluições para a quantificação ou a análise de fragmentos.

## Hibridizar sondas

Este passo liga as regiões-alvo do ADN às sondas de captura.

Os reagentes do Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit são compatíveis com painéis de enriquecimento de oligonucleótidos de ADN da Illumina e de terceiros. Para mais informações sobre especificações necessárias para painéis de terceiros, consulte [Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento na página 11](#).

## Consumíveis

- EHB2 (Enrichment Hyb Buffer 2; Tampão de hibridização de enriquecimento 2)
- NHB2 (HYB Buffer 2 + IDT NXT Blockers; Tampão de hibridização 2 + Bloqueadores IDT NXT) (tampa azul)
- Painel de sondas de enriquecimento
- Placa de PCR de 96 poços
- Selo adesivo
- Prepare para procedimento posterior:
  - SMB3 (Streptavidin Magnetic Beads; Esferas magnéticas de estreptavidina)
  - EEW (Enhanced Enrichment Wash Buffer; Tampão de lavagem de enriquecimento melhorado) (tampa âmbar)

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Sobre reagentes

- O NHB2 precipita e separa-se durante o armazenamento.
- O painel de sondas de enriquecimento refere-se ao painel de oligonucleótidos de enriquecimento escolhido da Illumina.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
EHB2	2 °C a 8 °C	Leve à temperatura ambiente. Agite por vórtice para misturar. Se observar cristais ou turvação, repita o vórtex, ou pipete para cima e para baixo para misturar até a solução ficar límpida.
Painel de sondas de enriquecimento	-25 °C a -15 °C (Illumina)	Para painéis da Illumina e de terceiros, leve à temperatura ambiente. Agite por vórtice para misturar.
NHB2 (tampa azul)	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente. Quando estiver à temperatura ambiente, pré-aqueça no incubador de microamostras até à mesma temperatura que a sonda que estiver a utilizar durante 5 minutos. Agite por vórtex à velocidade máxima, 3 vezes, durante 10 segundos de cada vez para ressuspender. Centrifugue brevemente. Pipete para cima e para baixo desde o fundo do tubo. Se observar cristais ou turvação, repita o vórtex, ou pipete para cima e para baixo para misturar até a solução ficar límpida. Utilize enquanto quente para evitar a reformação de precipitados.
SMB3*	2 °C a 8 °C	Se for para o próximo passo imediatamente após a espera de 90 minutos no programa HYB, leve à temperatura ambiente pelo menos 2 horas antes de iniciar o programa HYB.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Item	Armazenamento	Instruções
EEW* (tubo âmbar)	-25 °C a -15 °C	Se for para o próximo passo imediatamente após a espera de 90 minutos no programa HYB, leve à temperatura ambiente pelo menos 2 horas antes de iniciar o programa HYB. Se estiver à temperatura ambiente, pré-aqueça no incubador de microamostras até à temperatura de hibridização e captura aplicável durante 30 minutos antes de o programa HYB terminar.

\*Se parar antes do procedimento seguinte, atrase a preparação do reagente até chegar a esse procedimento.

2. Guarde o seguinte programa HYB no termociclador usando o número apropriado de ciclos, que se encontram indicados na [Tabela 3](#).
  - Escolha a opção de tampa pré-aquecida e regular a 100 °C
  - Defina o volume de reação
    - [ADN genómico de alta qualidade] 100 µl
    - [ADN genómico extraído de amostras FFPE] 25 µl
  - 98 °C durante 5 minutos
  - X ciclos de 1 minuto cada, começando a 98 °C no primeiro ciclo e, em seguida, diminuindo 2 °C por ciclo
  - Mantenha à temperatura aplicável durante 90 minutos:
    - [ADN genómico extraído de amostras FFPE] 58 °C
    - [Painéis de sondas de 80 mer] 58 °C
    - [Identificação de variante somática] 58 °C
    - [Todos os outros] 62 °C

O tempo total de execução é ~115 minutos.

Tabela 3 Número de ciclos por amostra ou painel

Amostra e tipo de painel	Número de ciclos (X)
ADN genómico extraído de amostras FFPE (independentemente do tipo de painel)	20
Painéis de sondas de 80 mer (independentemente do tipo de amostra)	20
Identificação de variante somática	20
Todas as outras amostras e painéis	18



## Procedimento

1. **[ADN genómico de alta qualidade]** Adicione os seguintes reagentes *na ordem apresentada* para cada biblioteca em pool na placa de PCR.  
Não crie uma mistura principal. Criar uma mistura principal de NHB2 e EHB2 prejudica o rendimento do enriquecimento.
  - NHB2 (tampa azul) (50 µl)
  - Painel de sondas de enriquecimento (10 µl)
  - EHB2 (10 µl)
2. **[ADN genómico de alta qualidade]** Utilizando uma pipeta regulada para 90 µl, pipete cada poço 10 vezes para misturar.
3. **[ADN genómico extraído de amostras FFPE]** Adicione os seguintes reagentes *na ordem apresentada* para cada biblioteca do pool na placa de PCR.  
Não crie uma mistura principal. Criar uma mistura principal de NHB2 e EHB2 prejudica o rendimento do enriquecimento.
  - NHB2 (tampa azul) (12,5 µl)
  - Painel de sondas de enriquecimento (2,5 µl)
  - EHB2 (2,5 µl)
4. **[ADN genómico extraído de amostras FFPE]** Utilizando uma pipeta regulada para 20 µl, pipete cada poço 10 vezes para misturar.
5. Sele a placa e centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
6. Coloque a placa de amostra no termociclador pré-programado e execute o programa HYB.
7. Prossiga imediatamente para o próximo procedimento quando o tempo de manutenção de temperatura do programa HYB terminar.



### ATENÇÃO

A precipitação ocorre se a temperatura da reação de hibridização descer abaixo da temperatura ambiente.

## Capturar sondas hibridizadas

Este passo utiliza esferas magnéticas de estreptavidina (Streptavidin Magnetic Beads, SMB3) para capturar sondas hibridizadas com as regiões de interesse alvo.

### Consumíveis

- EEW (Enhanced Enrichment Wash Buffer; Tampão de lavagem de enriquecimento melhorado) (tampa âmbar)
- EE1 (Enrichment Elution Buffer 1; Tampão de eluição de enriquecimento 1)

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- ET2 (Elute Target Buffer 2; Tampão alvo de eluição 2)
- HP3 (2 N NaOH)
- SMB3 (Streptavidin Magnetic Beads; Esferas magnéticas de estreptavidina)
- Tubo de microcentrifugação de 1,5 ml
- Placa MIDI de 96 poços
- Placa de PCR de 96 poços
- Selo adesivo
- Suporte magnético de placas MIDI
- Prepare para procedimento posterior:
  - Enhanced PCR Mix (Mistura PCR melhorada) (EPM)
  - PCR Primer Cocktail (Cocktail de primers PCR) (PPC)

## Sobre reagentes

- EEW
  - Verifique se o EEW foi descongelado à temperatura ambiente durante pelo menos 2 horas antes de o pré-aquecer num incubador de microamostras.
  - Verifique se o EEW foi aquecido num incubador de microamostras durante 30 minutos antes de o programa HYB terminar.
  - Deixe o EEW no incubador de microamostras quando não estiver a ser utilizado. O EEW deve permanecer aquecido durante todo o protocolo.
  - Pode estar turvo após atingir a temperatura ambiente.
  - Pode parecer amarelo.
- SMB3
  - SMB3 deve estar à temperatura ambiente antes da sua utilização.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis.

Item	Armazenamento	Instruções
SMB3	2 °C a 8 °C	Deixe repousar durante 2 horas para atingir a temperatura ambiente. Inverta e, em seguida, agite por vórtex até estar completamente ressuspense.
EEW (tubo âmbar)	-25 °C a -15 °C	Após incubação de 2 horas à temperatura ambiente, pré-aqueça num incubador de microamostras até à temperatura aplicável de hibridização e captura durante 30 minutos antes de o programa HYB terminar.

Item	Armazenamento	Instruções
EE1	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente e, em seguida, agite por vórtex.
HP3	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente e, em seguida, agite por vórtex.
ET2	2 °C a 8 °C	Leve à temperatura ambiente. Agite por vórtice para misturar.
EPM	-25 °C a -15 °C	Descongele em gelo durante uma hora. Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente. Reserve em gelo.
PPC	-25 °C a -15 °C	Descongele em gelo durante uma hora. Agite por vórtex para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente. Reserve em gelo.

2. Pré-aqueça um incubador de microamostras com uma inserção do bloco de aquecimento MIDI para incubar a placa de amostra a uma das seguintes temperaturas. Um segundo incubador de microamostras opcional pode ser utilizado para pré-aquecer o EEW. Deixe repousar o EEW no topo da inserção do bloco de aquecimento MIDI.
  - [FFPE] 58 °C
  - [Painéis de sondas de 80 mer] 58 °C
  - [Identificação de variante somática] 58 °C
  - [Todos os outros] 62 °C

## Procedimento

### Captura

1. Adicione SMB3 ao poço correspondente de uma nova placa MIDI como se segue.
  - [ADN genómico de alta qualidade] Adicione 250 µl de SMB3.
  - [ADN genómico extraído de amostras FFPE] Adicione 62,5 µl de SMB3.
2. Utilizando uma pipeta regulada para 100 µl para ADN genómico de alta qualidade ou 25 µl para ADN genómico extraído de amostras FFPE, transfira cada biblioteca em pool da placa de PCR de 96 poços para o poço correspondente na nova placa MIDI.
3. Sele a placa e agite a 1200 rpm durante 4 minutos.
4. Se ocorrerem salpicos, centrifugue a placa brevemente.
5. Coloque a placa de bibliotecas em pool que está no bloco de aquecimento MIDI no incubador de microamostras, debaixo do tubo de EEW, feche a tampa e, em seguida, incube durante 15 minutos à temperatura adequada:
  - [FFPE] 58 °C
  - [Painel de sondas de 80 mer] 58 °C
  - [Identificação de variante somática] 58 °C
  - [Todos os outros] 62 °C

## With Enrichment Dx

6. Retire a placa de bibliotecas em pool e centrifugue a  $280 \times g$  durante 30 segundos.
7. Coloque imediatamente num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).
8. **[ADN genómico de alta qualidade]** Utilizando uma pipeta regulada para 200  $\mu\text{l}$ , remova e elimine todo o sobrenadante de cada poço sem perturbar os sedimentos de esferas.
9. **[ADN genómico extraído de amostras FFPE]** Utilizando uma pipeta regulada para 90  $\mu\text{l}$ , remova e elimine todo o sobrenadante de cada poço sem perturbar os sedimentos de esferas.
10. Remova e elimine todo o sobrenadante residual.

### Lavagem

1. Retire do suporte magnético.
2. **[ADN genómico de alta qualidade]** Remova rapidamente o EEW do incubador de microamostras e adicione 200  $\mu\text{l}$  a cada poço.
3. **[ADN genómico extraído de amostras FFPE]** Remova rapidamente o EEW do incubador de microamostras e adicione 50  $\mu\text{l}$  a cada poço.
4. Reponha o EEW não utilizado no incubador de microamostras e mantenha-o aquecido.
5. Sele e agite a 1800 rpm durante 4 minutos.
6. Coloque a placa de amostra na inserção do bloco aquecido MIDI no incubador de microamostras, por baixo do tubo de EEW, feche a tampa e, em seguida, incube durante 5 minutos à temperatura aplicável:
  - [FFPE] 58 °C
  - [Painéis de sondas de 80 mer] 58 °C
  - [Identificação de variante somática] 58 °C
  - [Todos os outros painéis] 62 °C
7. Coloque imediatamente num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).
8. Utilizando uma pipeta regulada para 200  $\mu\text{l}$  para ADN genómico de alta qualidade ou 50  $\mu\text{l}$  para ADN genómico extraído de amostras FFPE, remova e elimine todo o sobrenadante de cada poço.
9. Repita os passos 1 a 8 duas vezes para um total de três lavagens.

### Lavagem de transferência

1. Retire do suporte magnético.
2. **[ADN genómico de alta qualidade]** Remova rapidamente o EEW do incubador de microamostras e adicione 200  $\mu\text{l}$  a cada poço.
3. **[ADN genómico extraído de amostras FFPE]** Remova rapidamente o EEW do incubador de microamostras e adicione 50  $\mu\text{l}$  a cada poço.
4. Sele e agite a 1800 rpm durante 4 minutos. Se ocorrerem salpicos, reduza a velocidade para 1600 rpm.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

5. Transfira a solução de esferas ressuspensas para uma nova placa MIDI.  
Alguma amostra pode ficar nos poços.



## ATENÇÃO

Transferir o reagente minimiza o transporte de reagentes residuais que possam inibir a PCR a jusante.

6. Coloque a placa de amostra na inserção do bloco aquecido MIDI no incubador de microamostras, feche a tampa e, em seguida, incube durante 5 minutos à temperatura aplicável:
- [FFPE] 58 °C
  - [Painéis de sondas de 80 mer] 58 °C
  - [Identificação de variante somática] 58 °C
  - [Todos os outros] 62 °C
7. Coloque imediatamente num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).
8. Utilizando uma pipeta regulada para 200 µl para ADN genómico de alta qualidade ou 50 µ para ADN genómico extraído de amostras FFPE, remova e elimine todo o sobrenadante de cada poço.
9. Centrifugue a placa a 280 × g durante 30 segundos.
10. Coloque num suporte magnético de placas MIDI durante 10 segundos.
11. Utilize uma pipeta de 20 µl para remover e eliminar líquido residual de cada poço.
12. Prossiga imediatamente para [Eluir na página 45](#) para prevenir a secagem excessiva das esferas e a perda de rendimento de bibliotecas.

## Eluir

1. Combine os seguintes volumes para preparação de uma Mistura principal de eluição. Multiplique cada volume pelo número de bibliotecas em pool a ser processadas.
- EE1 (28,5 µl)
  - HP3 (1,5 µl)
- O excedente de reagente adicional está incluído no volume.
2. Agite por vórtex e, em seguida, centrifugue brevemente.
3. Retire a placa MIDI do suporte magnético.
4. Adicione 23 µl de Mistura principal de eluição a cada poço.
5. Sele a placa e agite a 1800 rpm durante 2 minutos.
6. Incube a placa à temperatura ambiente durante 2 minutos.
7. Centrifugue a 280 × g durante 30 segundos.
8. Coloque num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Transfira 21 µl de sobrenadante da placa MIDI para o poço correspondente da nova placa de PCR de 96 poços.
- Elimine a placa MIDI.
- Adicione 4 µl de ET2 a cada poço contendo 21 µl de sobrenadante.
- Regule a pipeta para 20 µl e pipete cada poço lentamente 10 vezes para misturar.
- Sele a placa da amostra e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
- Incube a placa durante 1 minuto à temperatura ambiente.

## Amplificar biblioteca enriquecida

Este passo utiliza PCR para amplificar a biblioteca enriquecida.

### Consumíveis

- EPM (Enhanced PCR Mix; Mistura PCR melhorada)
- PPC (PCR Primer Cocktail; Cocktail de primers PCR)
- Selo adesivo

### Preparação

- Prepare os seguintes consumíveis:

Item	Armazenamento	Instruções
EPM	-25 °C a -15 °C	Descongele a 4 °C ou em gelo durante uma hora. Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente. Reserve em gelo.
PPC	-25 °C a -15 °C	Descongele a 4 °C ou em gelo durante uma hora. Agite por vórtex para misturar e, em seguida, centrifugue brevemente. Reserve em gelo.

- Guarde o seguinte programa AMP num termociclador, usando o número apropriado de ciclos PCR, número que se encontra indicado na tabela a seguir.
  - Escolha a opção de tampa pré-aquecida e regular a 100 °C
  - Defina o volume de reação para 50 µl
  - 98 °C durante 45 segundos
  - (X) ciclos de:
    - 98 °C durante 30 segundos
    - 60 °C durante 30 segundos
    - 72 °C durante 30 segundos

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- 72 °C durante 5 minutos
- Mantenha a 10 °C

O tempo total de execução é ~35 minutos.

Amostra e tipo de painel	(X) Ciclos
FFPE	14
Illumina Exome Panel (CEX) para ADN genómico de alta qualidade	10
Illumina Exome Panel (CEX) para amostras FFPE	12
Todas as outras amostras e painéis	12 <sup>1234</sup>

<sup>1</sup> Pode ser ajustado até 15 ciclos para pequenos painéis de terceiros através de otimização posterior. Se utilizar amostras FFPE, o número de ciclos pode ser ajustado até 17.

<sup>2</sup> Pode ser ajustado até 17 ciclos para pequenos painéis de terceiros que tenham apenas 500 sondas. Se utilizar amostras FFPE, o número de ciclos pode ser ajustado até 19.

<sup>3</sup> Pode ser ajustado até 14 ciclos para amostras FFPE.

<sup>4</sup> Aumentar o número de ciclos de PCR pode resultar numa taxa de duplicações mais elevada e em tamanhos de fragmentos menores em amostras FFPE.

## Procedimento

1. Adicione 5 µl de PPC a cada poço.
2. Adicione 20 µl de EPM a cada poço.
3. Sele a placa e agite a 1200 rpm durante 1 minuto.
4. Centrifugue a placa a 280 × g durante 10 segundos.
5. Coloque no termociclador pré-programado e execute o programa AMP.

## PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, armazene entre 2 °C e 8 °C até um máximo de dois dias. Em alternativa, deixe no termociclador durante até 24 horas.

## Limpar a biblioteca enriquecida amplificada

Este passo utiliza esferas de limpeza para purificar a biblioteca enriquecida e remover produtos indesejados.

## Consumíveis

- CB (Cleanup Beads; Esferas de limpeza)
- RSB (Resuspension Buffer; Tampão de ressuspensão)
- Etanol 80% recém-preparado (EtOH)
- Selos adesivos
- Placa MIDI de 96 poços

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Placa de PCR de 96 poços
- Suporte magnético de placas MIDI

## Sobre reagentes

- Cleanup Beads (Esferas de limpeza)
  - Agite por vórtex antes de cada utilização.
  - Agite por vórtex frequentemente de forma a assegurar que as esferas estão distribuídas uniformemente.
  - Aspire e dispense lentamente devido à viscosidade da solução.

## Preparação

1. Prepare os seguintes consumíveis.

Item	Armazenamento	Instruções
CB	Temperatura ambiente	Agite por vórtex e inverta para misturar até à cor do líquido ficar homogénea.
RSB	2 °C a 8 °C	Leve à temperatura ambiente. Agite por vórtice para misturar.

2. Prepare o novo EtOH 80% a partir de etanol absoluto.

## Procedimento

1. Centrifugue a placa de PCR a 280 × g durante 10 segundos.
2. Agite as esferas de limpeza por vórtex 3 vezes durante 10 segundos, invertendo em seguida.
3. Adicione 40,5 µl de esferas de limpeza a cada poço de uma nova placa **MIDI**.
4. Transfira 45 µl de cada poço da placa de PCR para o poço correspondente da placa MIDI.
5. Sele a placa e agite a 1800 rpm durante 1 minuto.
6. Incube a placa MIDI à temperatura ambiente durante 5 minutos.
7. Centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
8. Coloque num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido ficar límpido (5 minutos).
9. Utilizando uma pipeta regulada para 95 µl, remova e elimine todo o sobrenadante de cada poço.
10. Lave duas vezes da seguinte forma.
  - a. Com a placa no suporte magnético, adicione 200 µl de solução nova de EtOH 80% sem misturar.
  - b. Incube durante 30 segundos.
  - c. Sem perturbar as esferas, remova e elimine o sobrenadante.
11. Seque ao ar no suporte magnético durante 5 minutos.
12. Ao secar ao ar, utilize uma pipeta de 20 µl para remover e eliminar EtOH residual de cada poço.
13. Retire do suporte magnético e adicione 32 µl de RSB a cada poço.



# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

14. Sele a placa e agite a 1800 rpm durante 1 minuto.
15. Incube a placa à temperatura ambiente durante 5 minutos.
16. Centrifugue a 280 × g durante 10 segundos.
17. Coloque num suporte magnético de placas MIDI e espere até o líquido estar límpido (2 minutos).
18. Transfira 30 µl de sobrenadante da placa MIDI de 96 poços para o poço correspondente da nova placa de PCR .
19. Elimine a placa MIDI.

## PONTO DE PARAGEM DE SEGURANÇA

Se parar, sele a placa e armazene entre -25 °C e -15 °C até um máximo de 7 dias.

## Verificar bibliotecas enriquecidas

Para quantificar a entrada de ADN genómico de cadeia dupla, utilize um método baseado em fluorescência com corante intercalado. Evite métodos que meçam ácido nucleico total, tais como NanoDrop ou outro método de absorvência UV.

1. Realize um ensaio com 1 µl das bibliotecas enriquecidas utilizando o seu método de quantificação.

**NOTA** A molaridade total de sonda impacta proporcionalmente o rendimento da biblioteca pós-enriquecimento.

Pode contar com um tamanho médio de fragmento de 125 a 235 bp e uma distribuição de fragmentos de ADN com um intervalo de tamanho de ~200 bp a ~1000 bp.

## With Enrichment Dx

**Diluir bibliotecas para a concentração inicial**

Este passo dilui as bibliotecas para a concentração inicial para o sistema de sequenciação do utilizador e é o primeiro passo numa diluição em série. Após a diluição para a concentração inicial, as bibliotecas estão prontas a ser desnaturadas e diluídas para a concentração de carregamento final.

Para a sequenciação, independentemente do painel de sonda de enriquecimento que estiver a utilizar, a Illumina recomenda configurar um ensaio de extremidades emparelhadas com 151 ciclos por leitura (2 × 151) e 10 ciclos por leitura índice. Se preferir menos leituras sobrepostas ou menos cobertura de dados brutos, pode diminuir a sequenciação para 2 × 126 ou 2 × 101.

1. Calcule o valor de molaridade da biblioteca ou das bibliotecas em pool utilizando a seguinte fórmula.
  - Para bibliotecas classificadas num analisador de fragmentos de ADN, utilize o tamanho médio obtido para a biblioteca.
  - Para todos os outros métodos de classificação, utilize 350 bp como o tamanho médio da biblioteca.

$$\frac{ng/\mu l \times 10^6}{660 \frac{g}{mol} \times \text{tamanho médio da biblioteca (bp)}} = \text{Molaridade (nM)}$$

Por exemplo, se a concentração da sua biblioteca for 20 ng/μl e o tamanho médio for 350 bp, o valor de molaridade correspondente será de 86,58 nM.

$$\frac{20ng/\mu l \times 10^6}{660 \frac{g}{mol} \times 350(bp)} = 86,58(nM)$$

2. Utilizando o valor de molaridade, calcule os volumes de RSB e de biblioteca necessários para diluir as bibliotecas para a concentração inicial para o sistema do utilizador.

Sistema de sequenciação	Volume mínimo de biblioteca necessária (μl)	Concentração inicial (nM)	Concentração de carregamento final (pM)
NextSeq 550Dx	10	2	1,2
MiSeqDx	5	4	11
NovaSeq 6000Dx	150 (S2) ou 310 (S4)	1,75	350

[NovaSeq 6000Dx] 1,75 nM é a concentração inicial para uma concentração de carregamento final de 350 pM. Se necessário, ajuste a concentração de carregamento final utilizando a tabela seguinte.

Concentração de carregamento final (pM)	Concentração da biblioteca em pool (nM)
100	0,50
150	0,75

Concentração de carregamento final (pM)	Concentração da biblioteca em pool (nM)
200	1
250	1,25
300	1,50
350	1,75
400	2
450	2,25
500	2,50

### 3. Diluir bibliotecas usando RSB:

- **Bibliotecas quantificadas como um pool de bibliotecas multiplexado** — Dilua o pool para a concentração inicial para o sistema do utilizador.
- **Bibliotecas quantificadas individualmente** — Dilua cada biblioteca para a concentração inicial para o sistema do utilizador. Adicione 10 µl de cada biblioteca diluída a um tubo para criar um pool de bibliotecas multiplexado.

### 4. Siga as instruções de desnaturação e diluição do seu sistema para diluir para a concentração de carregamento final.

- Para o NextSeq 550Dx System, consulte [Preparação para sequenciação no NextSeq 550Dx na página 51](#).
- Para o MiSeqDx System, consulte [Preparação para sequenciação no MiSeqDx na página 53](#).
- Para o NovaSeq 6000Dx System, consulte [Preparação para sequenciação no NovaSeq 6000Dx na página 54](#).

As concentrações de armazenamento finais são um ponto de partida e uma orientação geral. Otimize as concentrações para o seu fluxo de trabalho e método de quantificação durante ensaios de sequenciação subsequentes ou através da titulação das células de fluxo.

## Preparação para sequenciação no NextSeq 550Dx

Use as seguintes instruções para desnaturar e diluir bibliotecas para sequenciação no sistema de sequenciação NextSeq 550Dx.

### Consumíveis

- HT1 (Hybridization Buffer; Tampão de hibridização)
- 1 N NaOH
- 200 mM Tris-HCl, pH 7,0

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Preparação

Prepare uma *nova* diluição de 0,2 N NaOH para desnaturar as bibliotecas para sequenciação. Para prevenir que pequenos erros de pipetagem afetem a concentração final de NaOH, é preparado volume extra.



### ATENÇÃO

Uma diluição de 0,2 N NaOH recentemente preparada é essencial para o processo de desnaturação. A desnaturação desadequada pode diminuir o rendimento.

1. Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para diluir 1 N NaOH para 0,2 N NaOH:

1. Prepare os seguintes consumíveis.

Item	Armazenamento	Instruções
HT1	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente. Conserve entre 2 °C e 8 °C até estar pronto para diluir as bibliotecas desnaturadas.

2. Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para preparar a nova diluição de NaOH:

- Água laboratorial (800 µl)
- 1 N NaOH (200 µl)

O resultado é 1 ml de 0,2 N NaOH.

3. Inverta o tubo várias vezes para misturar.

4. Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para preparar 200 mM Tris-HCl, pH 7,0.

- Água laboratorial (800 µl)
- 1 M Tris-HCl, pH 7,0 (200 µl)

O resultado é 1 ml de 200 mM Tris-HCl, pH 7,0

**NOTA** Mantenha o tubo tapado. Utilize a nova diluição dentro de **12 horas**.

## Desnaturar bibliotecas

1. Combine os seguintes volumes de biblioteca e de 0,2 N NaOH recentemente diluído num tubo de microcentrifugação.

- 10 µl de biblioteca
- 10 µl de 0,2 N NaOH

2. Agite brevemente por vórtex e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 1 minuto.

3. Incube à temperatura ambiente durante 5 minutos.

4. Adicione 10 µl de 200 mM Tris-HCl, pH 7,0.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

## Diluir biblioteca desnaturada para 20 pM

1. Adicione 970 µl de HT1 pré-refrigerado ao tubo com bibliotecas desnaturadas.  
O resultado é uma biblioteca desnaturada a 20 pM.
2. Agite brevemente por vórtex e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 1 minuto.
3. Coloque as bibliotecas de 20 pM em gelo até estar pronto para avançar para a diluição final.

## Diluir bibliotecas para a concentração de carregamento

1. Adicione os seguintes volumes para diluir a solução de biblioteca desnaturada a 20 pM para 1,2 pM.
  - Solução de biblioteca desnaturada (78 µl)
  - HT1 pré-refrigerado (1222 µl)O volume total é 1,3 ml a 1,2 pM.
2. Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue com impulsos.
3. Avance para a sequenciação. Para mais informações consulte o *Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx (documento n.º 1000000009513)*.

## Preparação para sequenciação no MiSeqDx

Utilize as seguintes instruções para desnaturar e diluir bibliotecas para sequenciação no sistema de sequenciação MiSeqDx.

### Consumíveis

- HT1 (Hybridization Buffer; Tampão de hibridização)
- 1 N NaOH

### Preparação

Prepare uma *nova* diluição de 0,2 N NaOH para desnaturar as bibliotecas para sequenciação. Para prevenir que pequenos erros de pipetagem afetem a concentração final de NaOH, é preparado volume extra.



#### ATENÇÃO

Uma diluição de 0,2 N NaOH recentemente preparada é essencial para o processo de desnaturação. A desnaturação desadequada pode diminuir o rendimento.

1. Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para diluir 1 N NaOH para 0,2 N NaOH:
1. Prepare os seguintes consumíveis.

Item	Armazenamento	Instruções
HT1	-25 °C a -15 °C	Descongele à temperatura ambiente. Conserve entre 2 °C e 8 °C até estar pronto para diluir as bibliotecas desnaturadas.

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para preparar a nova diluição de NaOH:
  - Água laboratorial (800 µl)
  - 1 N NaOH (200 µl)O resultado é 1 ml de 0,2 N NaOH.

**NOTA** Mantenha o tubo tapado. Utilize a nova diluição dentro de **12 horas**.

## Desnaturar uma biblioteca de 4 nM

- Junte os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação.
  - Biblioteca de 4 nM (5 µl)
  - 0,2 N NaOH (5 µl)
- Agite brevemente por vórtex e, em seguida, centrifugue a 280 × g durante 1 minuto.
- Incube à temperatura ambiente durante 5 minutos.
- Adicione 990 µl de HT1 pré-refrigerado ao tubo que contém a biblioteca desnaturada.  
O resultado é 1 ml de biblioteca desnaturada a 20 pM.

## Diluir biblioteca desnaturada a 20 pM

- Dilua até à concentração desejada usando os seguintes volumes.

Concentração	6 pM	8 pM	10 pM	11 pM	12 pM	15 pM	20 pM
Biblioteca 20 pM	180 µl	240 µl	300 µl	330 µl	360 µl	450 µl	600 µl
HT1 pré-refrigerado	420 µl	360 µl	300 µl	270 µl	240 µl	150 µl	0 µl

- Inverta para misturar e, em seguida, centrifugue com impulsos.
- Avance para a sequenciação. Para mais informações, consulte o *Guia de referência do instrumento MiSeqDx para MOS v4 (documento n.º 1000000157953)*.

## Preparação para sequenciação no NovaSeq 6000Dx

Use as seguintes instruções para desnaturar e diluir bibliotecas para sequenciação no sistema de sequenciação NovaSeq 6000Dx.

### Consumíveis

- HP3 (2 N NaOH)
- RSB (Resuspension Buffer; Tampão de ressuspensão)
- 1 N NaOH
- 10 mM Tris-HCl, pH 8,5

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

- 400 mM Tris-HCl, pH 8,0
- NovaSeq 6000Dx library tube

## Preparação

Prepare uma *nova* diluição de 0,2 N NaOH para desnaturar as bibliotecas para sequenciação. Para prevenir que pequenos erros de pipetagem afetem a concentração final de NaOH, é preparado volume extra.



### ATENÇÃO

Uma diluição de 0,2 N NaOH recentemente preparada é essencial para o processo de desnaturação. A desnaturação desadequada pode diminuir o rendimento.

1. Combine os seguintes volumes num tubo de microcentrifugação para diluir 1 N NaOH para 0,2 N NaOH:

Tabela 4 Modo S2

Reagente	Volume para uma célula de fluxo (µl)	Volume para duas células de fluxo (µl)
Água laboratorial	40	80
1 N NaOH armazenado	10	20

Estes volumes resultam em 50 µl de 0,2 N NaOH para uma célula de fluxo ou 100 µl de 0,2 N NaOH para duas células de fluxo.

Tabela 5 Modo S4

Reagente	Volume para uma célula de fluxo (µl)	Volume para duas células de fluxo (µl)
Água laboratorial	80	160
1 N NaOH armazenado	20	40

Estes volumes resultam em 100 µl de 0,2 N NaOH para uma célula de fluxo ou 200 µl de 0,2 N NaOH para duas células de fluxo.

2. Inverta várias vezes para misturar ou agite por vórtex completamente.

**NOTA** Mantenha o tubo tapado. Utilize a nova diluição dentro de **12 horas**.

## Criar um pool da biblioteca normalizada

A concentração de carregamento pode variar dependendo da preparação da biblioteca, da quantificação e dos métodos de normalização.

## With Enrichment Dx

Siga as instruções seguintes para normalizar as bibliotecas para a concentração adequada e, em seguida, faça o pooling. As bibliotecas sequenciadas na mesma célula de fluxo têm de ser combinadas num pool normalizado único.

**NOTA** O número máximo de amostras que podem ser executadas por pista com o Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Kit é 192. O limite deve-se ao número total de índices duais únicos no Set A e B.

## Normalizar bibliotecas para pooling

- Determine a concentração da biblioteca em pool necessária com base na concentração de carregamento final desejada.
  - Para uma concentração final de 350 pM, a concentração da biblioteca em pool necessária é de 1,75 nM.
  - Para determinar a concentração da biblioteca em pool para uma concentração de carregamento final diferente, consulte [Diluir bibliotecas para a concentração inicial na página 50](#).
- Normalize as bibliotecas para a concentração da biblioteca em pool desejada utilizando 10 mM Tris-HCl, pH 8,5.  
Para obter ajuda para diluir as bibliotecas para a concentração adequada, consulte a [Calculadora de Pooling](#) no website da Illumina.

### Concentrações de carregamento recomendadas

A concentração de carregamento de ADN ideal depende do tipo de biblioteca e do tamanho das inserções. Para bibliotecas > 450 bp, podem ser necessárias concentrações de carregamento mais elevadas.

## Fazer o pooling de bibliotecas normalizadas e adicionar o PhiX Control opcional

- Combine o volume adequado de cada biblioteca normalizada com um novo tubo de microcentrifugação para ter como resultado um dos seguintes volumes finais:

Modo	Volume final (µl)
S2	150
S4	310

- [Opcional]** Pico de 1% de PhiX não desnaturado> da seguinte forma.
  - Dilua 10 nM PhiX para 2,5 nM utilizando 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5.
  - Adicione o volume adequado de 2,5 nM PhiX não desnaturado ao tubo do pool da biblioteca não desnaturada.

Modo	2,5 nM PhiX não desnaturado (µl)	Pool da biblioteca não desnaturada (µl)
S2	0,9	150
S4	1,9	310



## With Enrichment Dx

A quantidade recomendada para bibliotecas bem equilibradas no pico de PhiX é de 1%. As bibliotecas de baixa diversidade podem necessitar de mais. Para utilizar PhiX control com as bibliotecas de baixa diversidade, contacte o Suporte Técnico da Illumina para receber orientações.

**Desnaturar o pool da biblioteca e PhiX Control opcional**

1. Adicione 0,2 N NaOH ao tubo do pool da biblioteca não desnaturada e faça PhiX opcional conforme as indicações seguintes.

Célula de fluxo	0,2 N NaOH	Pool da biblioteca não desnaturada (µl)	Volume resultante
S2	37	150	187 µl ou 187,9 µl com PhiX
S4	77	310	387 µl ou 388,9 µl com PhiX

2. Tape e, em seguida, agite brevemente por vórtex.
3. Centrifugue a 280 × g durante até 1 minuto.
4. Incube à temperatura ambiente durante 8 minutos para desnaturar.
5. Adicione 400 mM Tris-HCl, pH 8,0 conforme as indicações seguintes, para neutralizar.

Modo	400 mM Tris-HCl, pH 8,0 (µl)	Volume resultante
S2	38	225 µl ou 225,9 µl com PhiX
S4	78	465 µl ou 466,9 µl com PhiX

6. Tape e, em seguida, agite brevemente por vórtex.
7. Centrifugue a 280 × g durante até 1 minuto.
8. Transfira todo o volume da biblioteca desnaturada ou da biblioteca desnaturada e de PhiX para o NovaSeq 6000Dx library tube.
9. Avance para a sequenciação. Para mais informações, consulte os *NovaSeq 6000Dx Instrument Product Documentation (Documentos de produto do NovaSeq 6000Dx Instrument)* (documento n.º 200010105).

## Resolução de problemas

Use a seguinte tabela para resolver problemas no fluxo de trabalho. Se um ensaio de sequenciação ou preparação de biblioteca para uma amostra falhar duas vezes, poderá ser necessária uma resolução de problemas adicional. Contacte o Suporte Técnico da Illumina.

Observação	Causa possível	Ação recomendada
Ensaio de sequenciação não passa nas especificações de controlo de qualidade de ensaio	Erro de utilizador ou do equipamento laboratorial no fluxo de trabalho do ensaio	<p>Classifique as bibliotecas enriquecidas para assegurar um valor apropriado de rendimento de bibliotecas e distribuição de tamanhos de fragmentos. Repita a preparação de biblioteca a partir de um dos seguintes passos, dependendo de onde o erro de utilização ou do equipamento se suspeita ter ocorrido. Se não houver suspeitas, ou tenham ocorrido outros, contacte o Suporte Técnico da Illumina para resolver os problemas do seu ensaio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resequencie as bibliotecas. Consulte <a href="#">Preparação para sequenciação no NextSeq 550Dx na página 51</a>, <a href="#">Preparação para sequenciação no MiSeqDx na página 53</a> ou <a href="#">Preparação para sequenciação no NovaSeq 6000Dx na página 54</a>.</li> <li>• Volte a enriquecer as bibliotecas. Consulte <a href="#">Hibridizar sondas na página 38</a>.</li> <li>• Inicie a preparação de bibliotecas desde o início do fluxo de trabalho. Consulte <a href="#">Instruções de utilização na página 22</a>.</li> </ul>
	Problema de instrumentos	Contacte o Suporte Técnico da Illumina.
Erro com a geração de ficheiros FASTQ ou erro geral no sistema de sequenciação (por ex., erros de rede, erros de carga/descarga de reagentes, etc.)	Problema de instrumentos ou software	<p>Consulte o <i>Local Run Manager Software Guide (Guia do software Local Run Manager)</i> (documento n.º 100000002702) para obter ajuda sobre a geração de ficheiros FASTQ ou consulte o <i>Guia de referência do instrumento NextSeq 550Dx</i> (documento n.º 1000000009513), <i>Guia de referência do instrumento MiSeqDx para MOS v4</i> (documento n.º 1000000157953) ou os <i>NovaSeq 6000Dx Instrument Product Documentation (Documentos de produto do NovaSeq 6000Dx Instrument)</i> (documento n.º 200010105).</p> <p>Contacte o Suporte Técnico da Illumina para ajuda adicional.</p>

Observação	Causa possível	Ação recomendada
A biblioteca de ADN não gera rendimento suficiente para o carregamento de sequenciação	Os requisitos para a entrada de amostras não foram cumpridos	Confirme que a entrada de amostras é apropriada e repita a preparação de bibliotecas. Consulte <a href="#">Recomendações sobre a entrada de amostras na página 19</a> .
	Erro de utilização ou do equipamento no fluxo de trabalho do ensaio	Repita a preparação de biblioteca a partir de um dos seguintes passos, dependendo de onde o erro de utilização ou do equipamento se suspeita ter ocorrido. Se não houver suspeitas, ou tenham ocorrido outros, contacte o Suporte Técnico da Illumina para resolver os problemas do seu ensaio. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ressequencie as bibliotecas. Consulte <a href="#">Preparação para sequenciação no NextSeq 550Dx na página 51</a>, <a href="#">Preparação para sequenciação no MiSeqDx na página 53</a> ou <a href="#">Preparação para sequenciação no NovaSeq 6000Dx na página 54</a>.</li><li>• Volte a enriquecer as bibliotecas. Consulte <a href="#">Hibridizar sondas na página 38</a>.</li><li>• Inicie a preparação de bibliotecas desde o início do fluxo de trabalho. Consulte <a href="#">Instruções de utilização na página 22</a>.</li></ul>
	Os requisitos para o painel de sondas de enriquecimento não foram cumpridos	Confirme que o painel de sondas de enriquecimento é apropriado e repita a preparação de bibliotecas. Consulte <a href="#">Requisitos de painéis de sondas de enriquecimento na página 11</a> .

## Características de desempenho

As características de desempenho do DRAGEN for Illumina DNA Prep with Enrichment Dx Application for NovaSeq 6000Dx são fornecidas no *NovaSeq 6000Dx Instrument Package Insert (Folheto informativo do NovaSeq 6000Dx Instrument)* (documento n.º 200025276).

## Desempenho com painéis de exomas completos

O desempenho de painéis de exomas foi testado utilizando a entrada recomendada mais baixa (50 ng) e mais elevada (1000 ng) da Coriell Cell Line gDNA NA12878, com um conjunto de verdades estabelecidas para a deteção de variantes de linha germinal (Coriell platinum genome). O painel de exomas 1 (45 Mb) e o painel de exomas 2 (36,8 Mb) foram utilizados como painéis representativos. Foram testadas 24 réplicas técnicas

## With Enrichment Dx

através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx utilizando o painel de exomas 1 (45 Mb) com duas reações de enriquecimento 12-plex. As réplicas técnicas foram testadas através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx utilizando o painel de exomas 2 (36,8 Mb) numa única reação de enriquecimento 12-plex. As bibliotecas enriquecidas foram sequenciadas no sistema de sequenciação NextSeq 550Dx com o módulo do DNA GenerateFASTQ Dx Local Run Manager.

A tabela seguinte mostra os valores médios das métricas de desempenho da sequenciação secundária e da identificação de variante para as réplicas técnicas testadas com cada painel.

Tabela 6 Desempenho do ensaio com dois painéis de exomas completos

Painel	Enriquecimento de leitura única intervalada	Uniformidade de cobertura	Mediana do comprimento de fragmento	Sensibilidade de SNV <sup>1</sup>	Precisão de SNV <sup>2</sup>	Sensibilidade de indels <sup>1</sup>	Precisão de indels <sup>2</sup>
Painel de exomas 1 (45 Mb)	80%	96%	186 bp	96%	99%	90%	89%
Painel de exomas 2 (36,8 Mb)	93%	98%	188 bp	96%	99%	92%	93%

<sup>1</sup>Sensibilidade=Positivos/(positivos verdadeiros + falsos negativos)

<sup>2</sup>Precisão=Positivos Verdadeiros/(positivos verdadeiros + falsos positivos)

## Limite de deteção

O padrão de referência DNA Horizon HD799 foi utilizado para testar o limite de deteção. O HD799 consiste em ADN tratado com formalina e moderadamente comprometido, com SNV conhecidas em frequências alélicas que variam entre 1 e 24,5%. Foi utilizada a entrada mínima recomendada de ADN (50 ng) e foi avaliada a taxa de deteção de SNV com uma frequência de variantes alélicas (VAF)  $\geq 5,0\%$ . 16 réplicas técnicas foram testadas através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx utilizando o fluxo de trabalho FFPE, enriquecidas com um painel de enriquecimento pan-cancer (1,94 Mb) em 16 enriquecimentos (1-plex) e, em seguida, sequenciadas num instrumento NextSeq 550Dx com o módulo do DNA GenerateFASTQ Dx.

Todas as amostras passaram nos requisitos de desempenho de amostra específicos de painel de acordo com a tabela seguinte.

Tabela 7 Desempenho da amostra para limite de detecção

Painel	Taxa de detecção de variantes de SNV $\geq$ 5,0% VAF	Uniformidade Uniformidade de cobertura
Painel de enriquecimento pan-cancer (1,94 Mb, 523 genes)	100%	99%

## Substâncias interferentes

O impacto de potenciais interferentes foi avaliado no Illumina DNA Prep with Enrichment Dx através da avaliação do desempenho do ensaio na presença substâncias interferentes.

### Interferência em sangue Inteiro

Paracetamol (composto exógeno, fármaco), creatinina e triglicéridos (metabolitos endógenos) foram testados através da sua introdução em espécimes de sangue humano inteiro antes da extração de ADN. Para avaliar a interferência resultante da colheita de sangue (colheita curta), EDTA também foi introduzido em espécimes de sangue inteiro. Além disso, para avaliar a interferência resultante da preparação de amostras, foi introduzido etanol para biologia molecular em ADN extraído de sangue inteiro.

A tabela seguinte mostra as concentrações de teste por interferente.

Tabela 8 Substâncias potencialmente interferentes e concentrações testadas em sangue inteiro

Substância de teste	Concentração de teste
Acetaminofeno	15,6 mg/dL* Três vezes a concentração máxima esperada após a toma de uma dose terapêutica de fármaco.
Creatinina	15 mg/dL* Concentração mais elevada observada na população.
Triglicéridos	1,5 g/dL* Concentração mais elevada observada na população.
EDTA	6 mg/mL Três vezes a concentração esperada em sangue colhido em tubos EDTA.
Etanol de grau para biologia molecular	15% v/v Na eluição pós-extração de ADN.

\*Em conformidade com CLSI EP37-ED1:2018

Por cada substância interferente, 12 réplicas técnicas foram testadas através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx, enriquecido com o painel de exomas 1 (45 Mb) num enriquecimento único (12-plex) e, em seguida, sequenciadas num instrumento NextSeq 550Dx com o módulo do DNA GenerateFASTQ Dx.

## With Enrichment Dx

Para as substâncias testadas, todos os 12 espécimes cumpriram os requisitos de desempenho de amostra e não se observou interferência no desempenho do ensaio.

### Interferência em tecidos FFPE

Duas amostras colorretais FFPE foram testadas na presença e na ausência de hemoglobina a uma concentração de 0,1 mg por 10 µm de secção FFPE, representando o pior cenário possível de 50% de contaminação de uma amostra de tecido FFPE com sangue com elevada concentração de hemoglobina. Os espécimes foram testados através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx usando o painel de enriquecimento pan-cancer 1 (1,94 Mb) como um painel representativo em enriquecimentos singleplex. As bibliotecas enriquecidas foram, em seguida, sequenciadas num instrumento NextSeq 550Dx com o módulo do DNA GenerateFASTQ Dx. Todos os espécimes cumpriram os requisitos de desempenho de amostra e foi demonstrado que a hemoglobina não interfere com o desempenho do ensaio.

Para avaliar a interferência resultante da preparação da amostra, dois compostos exógenos foram adicionados ao ADN extraído de uma amostra de tecido FFPE de carcinoma da bexiga. As substâncias exógenas testadas são soluções de extração utilizadas normalmente no processo de extração de ADN e estão listadas com as quantidades testadas na tabela seguinte.

As soluções de substância de teste estão disponíveis comercialmente em kits de isolamento de ADN com base em colunas.

Tabela 9 Substâncias exógenas potencialmente interferentes e concentrações testadas em amostras FFPE

Substância de teste	Concentração de teste (µl/30 µl Eluato)
Solução de desparafinação	113 x 10 <sup>-6</sup>
Wash Buffer (Tampão de lavagem) AW2	0,417

Por cada substância interferente, oito réplicas técnicas foram testadas através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx, enriquecidas com o painel de enriquecimento pan-cancer (1,94 Mb) em enriquecimentos singleplex e, em seguida, sequenciadas num instrumento NextSeq 550Dx com o módulo do DNA GenerateFASTQ Dx.

Para ambas as substâncias testadas, todos os oito espécimes cumpriram os requisitos de desempenho de amostra e não se observou interferência no desempenho do ensaio.

## Contaminação cruzada

As Coriell Cell Line gDNA NA12878 (género feminino, 10 amostras), Coriell Cell Line gDNA NA12877 (género masculino, 12 amostras) e controlos sem modelo (No Template Controls, NTC, 2 amostras) foram testados através do ensaio Illumina DNA Prep with Enrichment Dx numa disposição de painel em xadrez. Todas as amostras usaram a recomendação de entrada de ADN genómico mais elevada (1000 ng) como a condição mais rigorosa para avaliar a contaminação cruzada da amostra. O teste foi executado duas vezes por dois operadores diferentes. O painel de exomas 1 (45 Mb) foi usado em reações de enriquecimento 12-plex. As bibliotecas enriquecidas foram sequenciadas no NextSeq 550Dx com o DNA GenerateFASTQ Dx. A

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

avaliação foi realizada através da avaliação da cobertura do cromossoma Y especificamente masculino nas amostras femininas, comparando os níveis de fundo de uma placa completa de amostras femininas e também a representação de índice nas amostras NTC.

Tabela 10 Resultados de contaminação cruzada

Amostras femininas com cobertura de cromossoma Y masculino em < 3x do ruído de base	Representação de índice em NTC
100%	< 0,0005%

## Anexo: Sequências de adaptador de índice dual único da Illumina

Estes adaptadores de índice dual único estão dispostos na placa de forma a garantir a estratégia de emparelhamento recomendada. Os adaptadores de índice têm um comprimento de 10 bases, em vez do comprimento típico de oito bases.

Adaptadores de índice 1, i7

CAAGCAGAAGACGGCATAACGAGAT [i7] GTCTCGTGGGCTCGG

Adaptadores de índice 2, i5

AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC [i5] TCGTCGGCAGCGTC

A seguinte sequência é usada para o corte de adaptadores na leitura 1 e na leitura 2.

CTGTCTCTTATACACATCT

## Adaptadores de índice placa A/conjunto 1

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0001	CGCTCAGTTC	TCGTGGAGCG
UDP0002	TATCTGACCT	CTACAAGATA
UDP0003	ATATGAGACG	TATAGTAGCT
UDP0004	CTTATGGAAT	TGCCTGGTGG
UDP0005	TAATCTCGTC	ACATTATCCT
UDP0006	GCGCGATGTT	GTCCACTTGT
UDP0007	AGAGCACTAG	TGGAACAGTA
UDP0008	TGCCTTGATC	CCTTGTTAAT

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0009	CTACTCAGTC	GTTGATAGTG
UDP0010	TCGTCTGACT	ACCAGCGACA
UDP0011	GAACATACGG	CATACACTGT
UDP0012	CCTATGACTC	GTGTGGCGCT
UDP0013	TAATGGCAAG	ATCACGAAGG
UDP0014	GTGCCGCTTC	CGGCTCTACT
UDP0015	CGGCAATGGA	GAATGCACGA
UDP0016	GCCGTAACCG	AAGACTATAG
UDP0017	AACCATTCTC	TCGGCAGCAA
UDP0018	GGTTGCCTCT	CTAATGATGG
UDP0019	CTAATGATGG	GGTTGCCTCT
UDP0020	TCGGCCTATC	CGCACATGGC
UDP0021	AGTCAACCAT	GGCCTGTCCT
UDP0022	GAGCGCAATA	CTGTGTTAGG
UDP0023	AACAAGGCGT	TAAGGAACGT
UDP0024	GTATGTAGAA	CTAACTGTAA
UDP0025	TTCTATGGTT	GGCGAGATGG
UDP0026	CCTCGCAACC	AATAGAGCAA
UDP0027	TGGATGCTTA	TCAATCCATT
UDP0028	ATGTTCGTGGT	TCGTATGCGG
UDP0029	AGAGTGCGGC	TCCGACCTCG
UDP0030	TGCCTGGTGG	CTTATGGAAT
UDP0031	TGCGTGTCAC	GCTTACGGAC
UDP0032	CATACACTGT	GAACATACGG
UDP0033	CGTATAATCA	GTCGATTACA
UDP0034	TACGCGGCTG	ACTAGCCGTG
UDP0035	GCGAGTTACC	AAGTTGGTGA
UDP0036	TACGGCCGGT	TGGCAATATT
UDP0037	GTCGATTACA	GATCACCGCG
UDP0038	CTGTCTGCAC	TACCATCCGT



# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0039	CAGCCGATTG	GCTGTAGGAA
UDP0040	TGACTACATA	CGCACTAATG
UDP0041	ATTGCCGAGT	GACAACTGAA
UDP0042	GCCATTAGAC	AGTGGTCAGG
UDP0043	GGCGAGATGG	TTCTATGGTT
UDP0044	TGGCTCGCAG	AATCCGGCCA
UDP0045	TAGAATAACG	CCATAAGGTT
UDP0046	TAATGGATCT	ATCTCTACCA
UDP0047	TATCCAGGAC	CGGTGGCGAA
UDP0048	AGTGCCACTG	TAACAATAGG
UDP0049	GTGCAACACT	CTGGTACACG
UDP0050	ACATGGTGTC	TCAACGTGTA
UDP0051	GACAGACAGG	ACTGTTGTGA
UDP0052	TCTTACATCA	GTGCGTCCTT
UDP0053	TTACAATTCC	AGCACATCCT
UDP0054	AAGCTTATGC	TTCCGTCGCA
UDP0055	TATTCCCTCAG	CTTAACCACT
UDP0056	CTCGTGCGTT	GCCTCGGATA
UDP0057	TTAGGATAGA	CGTCGACTGG
UDP0058	CCGAAGCGAG	TACTAGTCAA
UDP0059	GGACCAACAG	ATAGACCGTT
UDP0060	TTCCAGGTAA	ACAGTTCCAG
UDP0061	TGATTAGCCA	AGGCATGTAG
UDP0062	TAACAGTGTT	GCAAGTCTCA
UDP0063	ACCGCGCAAT	TTGGCTCCGC
UDP0064	GTTTCGCGCCA	AACTGATACT
UDP0065	AGACACATTA	GTAAGGCATA
UDP0066	GCGTTGGTAT	AATTGCTGCG
UDP0067	AGCACATCCT	TTACAATTCC
UDP0068	TTGTTCCGTG	AACCTAGCAC

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0069	AAGTACTCCA	TCTGTGTGGA
UDP0070	ACGTCAATAC	GGAATTCCAA
UDP0071	GGTGTACAAG	AAGCGCGCTT
UDP0072	CCACCTGTGT	TGAGCGTTGT
UDP0073	GTTCCGCAGG	ATCATAGGCT
UDP0074	ACCTTATGAA	TGTTAGAAGG
UDP0075	CGCTGCAGAG	GATGGATGTA
UDP0076	GTAGAGTCAG	ACGGCCGTCA
UDP0077	GGATACCAGA	CGTTGCTTAC
UDP0078	CGCACTAATG	TGACTACATA
UDP0079	TCCTGACCGT	CGGCCTCGTT
UDP0080	CTGGCTTGCC	CAAGCATCCG
UDP0081	ACCAGCGACA	TCGTCTGACT
UDP0082	TTGTAACGGT	CTCATAGCGA
UDP0083	GTAAGGCATA	AGACACATTA
UDP0084	GTCCACTTGT	GCGCGATGTT
UDP0085	TTAGGTACCA	CATGAGTACT
UDP0086	GGAATTCCAA	ACGTCAATAC
UDP0087	CATGTAGAGG	GATACCTCCT
UDP0088	TACACGCTCC	ATCCGTAAGT
UDP0089	GCTTACGGAC	CGTGTATCTT
UDP0090	CGCTTGAAGT	GAACCATGAA
UDP0091	CGCCTTCTGA	GGCCATCATA
UDP0092	ATACCAACGC	ACATACTTCC
UDP0093	CTGGATATGT	TATGTGCAAT
UDP0094	CAATCTATGA	GATTAAGGTG
UDP0095	GGTGGAAATAC	ATGTAGACAA
UDP0096	TGGACGGAGG	CACATCGGTG

## Adaptadores de índice placa B/conjunto 2

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0097	CTGACCGGCA	CCTGATACAA
UDP0098	GAATTGAGTG	TTAAGTTGTG
UDP0099	GCGTGTGAGA	CGGACAGTGA
UDP0100	TCTCCATTGA	GCACTACAAC
UDP0101	ACATGCATAT	TGGTGCCTGG
UDP0102	CAGGCGCCAT	TCCACGGCCT
UDP0103	ACATAACGGA	TTGTAGTGTA
UDP0104	TTAATAGACC	CCACGACACC
UDP0105	ACGATTGCTG	TGTGATGTAT
UDP0106	TTCTACAGAA	GAGCGCAATA
UDP0107	TATTGCGTTC	ATCTTACTGT
UDP0108	CATGAGTACT	ATGTCGTGGT
UDP0109	TAATTCTACC	GTAGCCATCA
UDP0110	ACGCTAATTA	TGGTTAAGAA
UDP0111	CCTTGTTAAT	TGTTGTTCGT
UDP0112	GTAGCCATCA	CCAACAACAT
UDP0113	CTTGTAATTC	ACCGGCTCAG
UDP0114	TCCAATTCTA	GTTAATCTGA
UDP0115	AGAGCTGCCT	CGGCTAACGT
UDP0116	CTTCGCCGAT	TCCAAGAATT
UDP0117	TCGGTCACGG	CCGAACGTTG
UDP0118	GAACAAGTAT	TAACCGCCGA
UDP0119	AATTGGCGGA	CTCCGTGCTG
UDP0120	GGCCTGTCCCT	CATTCCAGCT
UDP0121	TAGGTTCTCT	GGTTATGCTA
UDP0122	ACACAATATC	ACCACACGGT
UDP0123	TTCTGTACG	TAGGTTCTCT
UDP0124	GGTAACGCAG	TATGGCTCGA

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0125	TCCACGGCCT	CTCGTGCGTT
UDP0126	GATACCTCCT	CCAGTTGGCA
UDP0127	CAACGTCAGC	TGTTTCGCATT
UDP0128	CGGTTATTAG	AACCGCATCG
UDP0129	CGCGCCTAGA	CGAAGGTTAA
UDP0130	TCTTGGCTAT	AGTGCCACTG
UDP0131	TCACACCGAA	GAACAAGTAT
UDP0132	AACGTTACAT	ACGATTGCTG
UDP0133	CGGCCTCGTT	ATACCTGGAT
UDP0134	CATAACACCA	TCCAATTCTA
UDP0135	ACAGAGGCCA	TGAGACAGCG
UDP0136	TGGTGCCTGG	ACGCTAATTA
UDP0137	TAGGAACCGG	TATATTCGAG
UDP0138	AATATTGGCC	CGGTCCGATA
UDP0139	ATAGGTATTC	ACAATAGAGT
UDP0140	CCTTCACGTA	CGGTTATTAG
UDP0141	GGCCAATAAG	GATAACAAGT
UDP0142	CAGTAGTTGT	AGTTATCACA
UDP0143	TTCATCCAAC	TTCCAGGTAA
UDP0144	CAATTGGATT	CATGTAGAGG
UDP0145	GGCCATCATA	GATTGTCATA
UDP0146	AATTGCTGCG	ATTCCGCTAT
UDP0147	TAAGGAACGT	GACCGCTGTG
UDP0148	CTATACGCGG	TAGGAACCGG
UDP0149	ATTCAGAATC	AGCGGTGGAC
UDP0150	GTATTCTCTA	TATAGATTCCG
UDP0151	CCTGATACAA	ACAGAGGCCA
UDP0152	GACCGCTGTG	ATTCCTATTG
UDP0153	TTCAGCGTGG	TATTCCTCAG
UDP0154	AACTCCGAAC	CGCCTTCTGA

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0155	ATTCCGCTAT	GCGCAGAGTA
UDP0156	TGAATATTGC	GGCGCCAATT
UDP0157	CGCAATCTAG	AGATATGGCG
UDP0158	AACCGCATCG	CCTGCTTGGT
UDP0159	CTAGTCCGGA	GACGAACAAT
UDP0160	GCTCCGTCAC	TGGCGGTCCA
UDP0161	AGATGGAATT	CTTCAGTTAC
UDP0162	ACACCGTTAA	TCCTGACCGT
UDP0163	GATAACAAGT	CGCGCCTAGA
UDP0164	CTGGTACACG	AGGATAAGTT
UDP0165	CGAAGGTTAA	AGGCCAGACA
UDP0166	ATCGCATATG	CCTTGAACGG
UDP0167	ATCATAGGCT	CACCACCTAC
UDP0168	GATTGTCATA	TTGCTTGTAT
UDP0169	CCAACAACAT	CAATCTATGA
UDP0170	TTGGTGGTGC	TGGTACTGAT
UDP0171	GCGAACGCCT	TTCATCCAAC
UDP0172	CAACCGGAGG	CATAACACCA
UDP0173	AGCGGTGGAC	TCCTATTAGC
UDP0174	GACGAACAAT	TCTCTAGATT
UDP0175	CCACTGGTCC	CGCGAGCCTA
UDP0176	TGTTAGAAGG	GATAAGCTCT
UDP0177	TATATTCGAG	GAGATGTCGA
UDP0178	CGCGACGATC	CTGGATATGT
UDP0179	GCCTCGGATA	GGCCAATAAG
UDP0180	TGAGACAGCG	ATTACTCACC
UDP0181	TGTTTCGCATT	AATTGGCGGA
UDP0182	TCCAAGAATT	TTGTCAACTT
UDP0183	GCTGTAGGAA	GGCGAATTCT
UDP0184	ATACCTGGAT	CAACGTCAGC

Nome de índice	Bases i7 no adaptador	Bases i5 no adaptador
UDP0185	GTTGGACCGT	TCTTACATCA
UDP0186	ACCAAGTTAC	CGCCATACCT
UDP0187	GTGTGGCGCT	CTAATGTCTT
UDP0188	GGCAGTAGCA	CAACCGGAGG
UDP0189	TGCGGTGTTG	GGCAGTAGCA
UDP0190	GATTAAGGTG	TTAGGATAGA
UDP0191	CAACATTCAA	CGCAATCTAG
UDP0192	GTGTTACCGG	GAGTTGTACT

## Histórico de revisões

Documento	Data	Descrição da alteração
Documento n.º 200019584 v02	Setembro de 2022	Foram adicionados conteúdos para apoiar a sequenciação no NovaSeq 6000Dx Instrument.
Documento n.º 200019584 v01	Mai de 2022	Foram adicionados os nomes do sistema de sequenciação e os números de catálogo. Foram removidas as informações sobre a indexação dual única para bibliotecas monoindexadas.
Documento n.º 200019584 v00	Mai de 2022	Edição inicial.

## Patentes e marcas comerciais

Este documento e respetivo conteúdo são propriedade da Illumina, Inc. e das suas afiliadas ("Illumina") e destinam-se unicamente a utilização contratual por parte dos clientes relativamente à utilização dos produtos descritos no presente documento e para nenhum outro fim. Este documento e respetivo conteúdo não podem ser utilizados ou distribuídos para qualquer outro fim e/ou de outra forma transmitidos, divulgados ou reproduzidos por qualquer via, seja de que natureza for, sem a autorização prévia por escrito da Illumina. A Illumina não concede qualquer licença ao abrigo da sua patente, marca comercial, direito de autor ou direitos de jurisprudência nem direitos semelhantes de quaisquer terceiros por via deste documento.

As instruções contidas neste documento têm de ser estrita e explicitamente seguidas por pessoal qualificado e com a devida formação para garantir a utilização adequada e segura dos produtos aqui descritos. Todo o conteúdo deste documento tem de ser integralmente lido e compreendido antes da utilização dos referidos produtos.

A NÃO OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO PARA LER INTEGRALMENTE E SEGUIR EXPLICITAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES AQUI CONTIDAS PODE RESULTAR EM DANOS NOS PRODUTOS, LESÕES EM PESSOAS, INCLUINDO NOS UTILIZADORES OU OUTROS, E EM DANOS MATERIAIS, E IRÁ ANULAR QUALQUER GARANTIA APLICÁVEL AOS PRODUTOS.

A ILLUMINA NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE RESULTANTE DA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DOS PRODUTOS AQUI DESCRITOS (INCLUINDO PARTES DOS MESMOS OU DO SOFTWARE).

© 2022 Illumina, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as marcas comerciais são propriedade da Illumina, Inc. ou dos respetivos proprietários. Para informações específicas sobre marcas comerciais, consulte [www.illumina.com/company/legal.html](http://www.illumina.com/company/legal.html).

# Folheto informativo do Illumina DNA Prep With Enrichment Dx

illumina®

## Informações de contacto



Illumina  
5200 Illumina Way  
San Diego, Califórnia 92122 EUA  
+1 800 809 ILMN (4566)  
+1 858 202 4566 (fora da América do Norte)  
techsupport@illumina.com  
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.  
Steenoven 19  
5626 DK Eindhoven  
Países Baixos

### Promotor australiano

Illumina Australia Pty Ltd  
Nursing Association Building  
Level 3, 535 Elizabeth Street  
Melbourne, VIC 3000  
Austrália

## Etiquetas do produto

Para uma referência completa de símbolos que constam da embalagem e das etiquetas do produto, consulte a chave de símbolos em [support.illumina.com](http://support.illumina.com), no separador *Documentation* (Documentação) do seu kit.